

**Montage : voir vidéo sur la page de  
l'Adventus sur notre site internet :  
[www.orthinea.com](http://www.orthinea.com)**

## Notice de l'Adventus



102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400039	TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400039
APE 3250A		APE 3250A	

## Notice de l'Adventus

ORTHINEA vous remercie d'avoir choisi un de ses produits. L'Adventus est un produit de grande qualité, fabriqué en Suède par la société Decon Wheels AB. Il va étendre énormément votre autonomie en fauteuil roulant. Ne le réservez pas qu'au tout-terrain : vous serez étonné par ses avantages en ville !

### 1. Domaine d'utilisation

Votre Adventus est destinée à être fixé sur un fauteuil roulant à repose-pieds rigide, dans le cadre d'une utilisation normale de fauteuil roulant à propulsion manuelle. Elle est destinée à transporter une seule personne dans un environnement adapté.

Le repose-pieds doit être suffisamment solide pour supporter les efforts de torsion induits par l'Adventus. Sur les fauteuils roulants Panthera, il vous faut un repose-pieds renforcé en titane (charge maxi 150Kg). Sur les autres marques, merci de consulter le fabricant ou son importateur officiel.

### 2. Vérification

À réception de votre Adventus, vérifiez le bon état de l'ensemble et le gonflage de la roue (2 bars maximum). En cas de doute, contactez votre revendeur.

### 3. Montage

#### a. Type de repose-pieds

Par défaut, l'Adventus est réglée pour un repose-pieds à deux tubes.


Si le fauteuil dispose d'une plaque de recouvrement, il faudra la retirer (en totalité ou juste une bande au milieu) ou la percer de manière à laisser passer le crochet et la mâchoire de l'Adventus.

Si le fauteuil a un repose-pieds à tube unique avec une plaque, il faudra percer la plaque de manière à laisser passer la mâchoire de l'Adventus, et faire un autre trou à l'arrière de la plaque pour laisser passer le crochet de l'Adventus, pour qu'il agrippe la plaque correctement.

Toute question concernant la capacité du repose-pieds à supporter le bras de levier induit par l'Adventus, ou concernant les possibilités de modification du repose-pieds est à discuter avec le fabricant du fauteuil roulant.

#### b. Installation de la mâchoire

Essayez d'attraper le tube avant du repose-pieds avec la mâchoire de l'Adventus (sans forcer sur le levier). Si la mâchoire a besoin de plus d'ouverture, déplacez le crochet avant. Desserrez les vis qui verrouillent le crochet de part et d'autre et utilisez la grande vis indiquée ci-dessous pour déplacer le crochet. Le levier doit verrouiller la mâchoire en résistant légèrement.

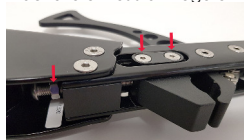

Verrouillez l'écrou de la grande vis et bloquez les quatre vis latérales pour stabiliser définitivement le crochet avant.

Déplacez de la même façon le crochet arrière (uniquement en utilisant les quatre vis latérales), de sorte que l'accroche soit bien ferme sur le repose-pieds.

#### c. Hauteur de l'Adventus

Desserrez d'un seul tour les vis situées dans les ouvertures de chaque côté de l'Adventus.

Réglez la hauteur en tournant la vis située sur le dessus de l'Adventus, devant le levier de verrouillage. Ne jamais défaire les vis entièrement. Aucune vis de l'Adventus n'est destinée à être enlevée.

Pour obtenir la bonne hauteur, placez l'Adventus en position de marche arrière et serrez la vis de réglage jusqu'à décoller les roues avant du fauteuil roulant de 5mm environ au-dessus du sol. Ces roues doivent à nouveau toucher le sol lorsque l'utilisateur s'assoit dans le fauteuil roulant. Lorsqu'on s'assoit dans le fauteuil roulant, l'Adventus doit pouvoir être mis en place et verrouillé sans soulever l'avant du fauteuil roulant.



Si le repose-pieds du fauteuil roulant s'avère trop haut pour le débattement de réglage ci-dessus, il faut enlever la roue et la replacer plus bas dans la fourche.

#### d. Réglages du pivot de fourche

Le pivot de fourche dispose de deux réglages :

- la dureté du rappel de la fourche, qui est réglable en tournant la très grosse vis située à l'avant
- la direction, qui est réglable par les petites vis à têtes creuses, en desserrant l'une et en serrant l'autre.

Le réglage usine étant en principe le meilleur compromis, il est conseillé de ne pas modifier ces réglages.



### 4. Utilisation

#### a. Mise en place (voir vidéo sur le site [www.orthinea.com](http://www.orthinea.com))

. Pivotez la roue de l'Adventus en position de marche arrière.

. Placez la mâchoire de l'Adventus entre les pieds, en engageant d'abord l'arrière puis en posant l'avant de la mâchoire.

. Abaissez le levier pour verrouiller la mâchoire.

#### b. Démarrage

Déplacez le fauteuil roulant vers l'avant en tournant légèrement pour replacer la roue de l'Adventus en position de marche avant, ce qui a pour effet de soulever les roues avant du fauteuil roulant du sol.

#### c. Démontage et transport

Replacez la roue de l'Adventus en position de marche arrière et levez le levier de verrouillage pour ouvrir la mâchoire.

Attention : accrocher l'Adventus ou le transporter dans un sac pris sur le dossier de votre fauteuil roulant modifie l'équilibrage du fauteuil roulant ! Veillez à modifier l'équilibrage du fauteuil roulant ou ajouter au moins un dispositif anti-basculer pour ne pas chuter vers l'arrière !

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400039   APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400039   APE 3250A	

**d. Entretien**

Un entretien soigné de votre Adventus augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le gonflage du pneu et le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre Adventus avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre Adventus après chaque sortie pour prévenir l'oxydation. Utilisez fréquemment un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

**e. Garantie**

L'Adventus est garantie 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre Adventus (par exemple usure du pneu). Elle ne couvre pas la casse d'un repose-pieds trop fragile pour recevoir l'Adventus. Il vous appartient de vérifier que le fabricant du fauteuil roulant autorise l'utilisation de l'Adventus sur ses modèles.

**f. Certification de conformité**

La société Decon Wheels AB certifie que son produit est conforme à la norme CE 93/42/EEG.

**g. Destruction et recyclage**

L'Adventus hors d'usage doit être sorti les jours de collecte d'encombrants ou jeté en déchetterie. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

**Bon de garantie de votre Adventus**

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison ORTHINEA :

Date limite de validité de la garantie :

Les accessoires ORTHINEA tels que l'Adventus sont garantis 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre Adventus (par exemple usure du pneu).

Les pièces échangées au titre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu'à la date limite de la garantie d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



**Partie à retourner complétée à Orthinea :**

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400039   APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400039   APE 3250A	