



TP 03 *Drain'confort*

APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids :	1.9 kg	Puissance :	24 W	Intensité sonore :	44 dB<I<46 dB
Dimensions :	11*28*23 cm	Intensité :	12 V		
Pression :	Réglable : 10-99 mmHg (13,5 – 132 mB)	Préréglage usine :	25mmHg		
Temps de traitement (séance):	30min				

Mode de régulation de la pression :

↪ Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

Durée du cycle :

↪ La durée fluctue de 65 à 115 secondes, selon la taille du membre à traiter et le niveau de pression programmée.

Gonflage des éléments :

↪ 2 rangées de 3 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.

Matériau des éléments :

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane
Fermeture : éléments thermo-soudés

Raccordement :

Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air
Pompe / tubes : avec connecteurs différenciés

Identification des éléments:

Manchons de 3 chambres (compartiments)
Bottes de 3 chambres
Hanchières de 3 chambres


Confort d'utilisation :

Grace à sa conception avancée, le TP03 est très silencieux, très simple d'utilisation.

UN CYCLE DE 7 PHASES

Les éléments de gonflage du TP03 comportent 3 chambres numérotées de 1 (distal) à 3 (proximal).

Il existe un "Gradient de Pression automatique" entre les 3 chambres. La pression sélectionnée par l'opérateur est celle qui sera constatée dans la chambre proximale en fin de cycle.

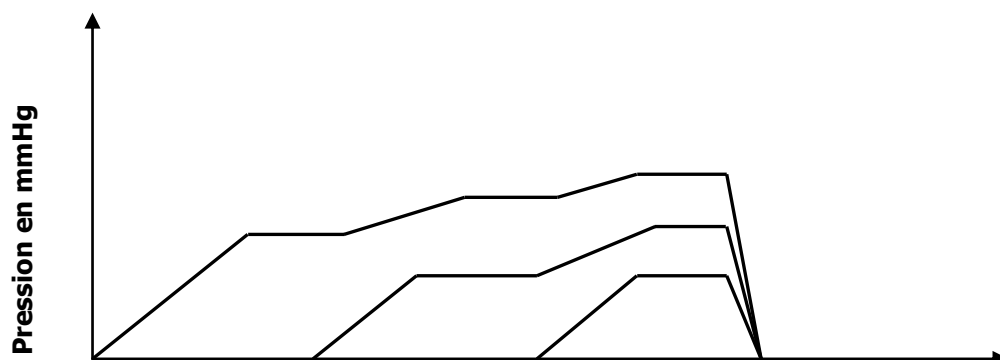

- Phase a** ⇒ Gonflage de la chambre 1
Phase b ⇒ Temps de travail de 4s. La chambre 1 restera gonflée jusqu'en fin de **phase f**
Phase c ⇒ Gonflage de la chambre 2 + supplément de pression dans la chambre 1
Phase d ⇒ Temps de travail de 4s. La chambre 2 restera gonflée jusqu'en fin de **phase f**
Phase e ⇒ Gonflage de la chambre 3 + suppléments de pression dans les chambres 1 et 2
Phase f ⇒ Temps de travail de 3s
Phase g ⇒ Dégonflage des 3 chambres et repos : 12s

INDICATIONS

- Œdèmes des membres : Lymphoedème - Phléboedème
- Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite
- Problèmes circulatoires
- Jambes lourdes
- Récupération post-chirurgical
- Remodelage corporel

CONTRE INDICATIONS

- Thrombose veineuse en phase aiguë
- Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter
- Décompensation cardiaque et rénale
- Présence de douleur ou d'insensibilité des membres
- Toute circonstance où l'augmentation des retours veineux et lymphatique est indésirable

RÉFÉRENCES

TP03	Appareil de drainage veino-lymphatique	
M3PPM	Manchon (modèle standard)	Ø 50 cm * 71 cm
M3PGM	Manchon (grand modèle)	Ø 58 cm * 77 cm
M3PSM	Manchon (sur mesure)	Ø X cm * X cm
B3PPM	Botte (modèle standard)	Ø 70 cm * 85 cm
B3PGM	Botte (grand modèle)	Ø 80 cm * 92 cm
B3PSM	Botte (sur mesure)	Ø X cm * X cm
H3P	Hanchière	Ø 72 cm * 106 cm
H3PSM	Hanchière (sur mesure)	Ø X cm * X cm
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	



DOCTP03F 2013-05-21