



Invacare®

Action® 4
NG

La rencontre entre
robustesse et esthétique

Trusted Solutions,
Passionate People



Confortable, pliable, robuste, *Invacare Action*⁴_{NG} est le fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme **Action** permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires. Il profite de série d'un double croisillon profilé innovant, de six coloris de châssis, d'une toile de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière et pochette de rangement, d'accoudoirs crantés et d'une roulette anti-bascule. **Action**⁴_{NG} permet ainsi un ajustement personnalisé aux besoins de l'utilisateur.



Performant et rigide

Les particularités du *Invacare Action*⁴_{NG} sont sa grande stabilité et sa rigidité, qui se répercutent sur la qualité de roulage et permettent de tirer bénéfice des mouvements du corps de l'utilisateur. Grâce à ses roues avant de 6" et fourches fines, il est également très maniable et manœuvrable pour la tierce-personne.

Un choix clinique

Action⁴_{NG} est un fauteuil entièrement ajustable : accoudoirs, dossier, potences, Sa large gamme d'options permettra une adaptation personnalisée aux besoins de l'utilisateur. L'assise peut être réglable en profondeur en option (sinon 3 profondeurs : 400, 450 et 500 mm) et une pente d'assise à 0°, 3° ou 6° est possible afin d'assurer un maintien postural optimum. De plus, il propose de série une toile de dossier bi-matière réglable en tension pour plus de confort et une roulette anti-bascule à droite pour plus de sécurité.



Transportable

Les roues à démontage rapide et le dossier pliant à mi-hauteur facilite le transfert du fauteuil à l'avant de la voiture ou dans le coffre. L'**Action**⁴_{NG} pèse seulement 8,3 kg sans les roues arrière.

Caractéristiques et Options



Roulette Anti-Bascule avec tube basculeur

Offre une sécurité maximale dans les pentes ou avec un dossier incliné. La fonction tube basculeur aide au franchissement d'obstacles.



Toile d'assise réglable en profondeur

Diminution de la profondeur d'assise sur 50 mm, de 500 à 450 mm et de 450 à 400 mm.



Dossier inclinable par vérin et pliant à mi-hauteur de série

Son encombrement limité facilite le transport du fauteuil. Le vérin gaz permet une inclinaison en douceur pour l'utilisateur et assiste la tierce personne.



Les potences et palettes

Un large choix de potences est proposé en option : Potence 80° pour plus de stabilité des membres inférieurs de l'utilisateur, repose-jambes, support amputé (réglable en hauteur et profondeur, potence 80° livrée en plus pour utilisation avec prothèse, écarteurs disponibles pour utilisation bilatérale). Egalement un large choix de palettes : fixe, réglable en angle et profondeur, monobloc (réglable en profondeur et en angle).



Toile de dossier bi-matière de série

Cette toile réglable en tension bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière. Le réglage en tension améliore le maintien dorsal.

 Bodypoint®



Ceintures de positionnement Bodypoint®

NOUVEAU

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement. Disponibles en option montée.



NOUVEAU

matrx
SEATING SERIES



Coussin d'assise RECFrance Profil'Air

Coussin à air à cellules pneumatiques, mono-compartiment, hauteur 70 mm. Disponible en option montée. Destiné à la prévention des escarres pour les patients à risque élevé ou très élevé.

Invacare Action⁴_{NG} Matrx®

Fauteuil équipé des dossiers et coussins de positionnement **Matrx (Elite, Elite Deep, Solution Xtra, Vi et Libra)**.



Freins tambours

Facilite le freinage du fauteuil par la tierce-personne



Invacare Action⁴_{NG} Dual HR

Système breveté de double main courante doté d'un démontage plus rapide des roues arrière et d'une plus grande précision de conduite grâce à un jeu mécanique réduit au niveau du cardan. La main courante intérieure est réversible pour s'adapter à chaque utilisateur.



Invacare Action⁴_{NG} Levier Pendulaire

Disponible en hauteurs d'assise 510, 485 et 460 mm.



Invacare Action⁴_{NG} XLT

Versión renforcée pour un poids patient jusqu'à 160 kg avec des largeurs de 505, 555 et 605 mm.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare Action⁴ _{NG}	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise
	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	350 - 510 ¹ mm	200-280 / 240/170-300 / 210-350 mm	200-400 / 330-460 / 440-510 mm	0° - 6°
Invacare Action⁴ _{NG}	Angle de dossier	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Largeur pliée hors-tout	Poids du fauteuil
	7° / -6° - 24° / 0° - 30°	Largeur d'assise + 190 mm	810 - 1040 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	305 mm	15,2 kg
Invacare Action⁴ _{NG}	Poids max. utilisateur	Poids de transport					
	125 / 160 kg ²	8,3 kg					



1. Dossier inclinable
2. Version XLT

Coloris du châssis

Rouge Rubis

Gris Ardoise

Vert Électrique

Bleu Océan

Noir Brillant

Blanc Perle



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Revêtement du siège

Nylon noir

