


COUSSIN ALOVA[®] GALBÉ TECHNIQUE



COUSSIN MOULÉ AVEC DÉCHARGE COCCYGIENNE INTÉGRÉE EN MATIÈRE VISCOÉLASTIQUE. POUR DES PERSONNES PESANT JUSQU'À 200 KG.

- **Efficacité:** la matière viscoélastique ALOVA[®] favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pressions maximales.
- **Sécurité:** la décharge postérieure diminue le risque d'escarre sacro-coccygienne. L'épaisseur de la matière de plus de 6 cm réduit le risque d'escarres ischiatiques (hauteur > à 6 cm). Déclive du coussin pour éviter le « glissé-avant », protection intégrale avec surface inférieure adhérente au siège.
- **Confort :** le textile imper-respirant améliore la thermorégulation lors d'une assise prolongée.

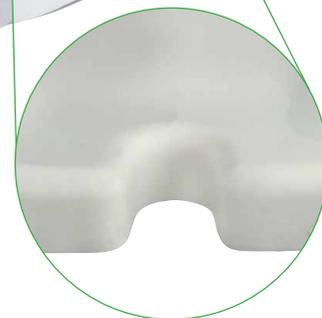



ALOVA® GALBÉ TECHNIQUE


Efficacité :

- Décharge coccygienne : prévention renforcée des escarres sacro-coccygiennes.
- Epaisseur fond de galbe > 6 cm : renforcement de la prévention d'escarres ischiatiques.

Ergonomie :

- 16 tailles et trois hauteurs : poids patient maxi jusqu'à 200 kg.
- Butée pelvienne, pour réduire le « Glissé avant »

- Dessous anti-dérapant.
- Protection amovible.
- Positionnement à gauche de la poignée de préhension sous le coussin : moins exposée aux déchirures et aux risques liés à l'hygiène.

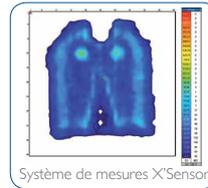

Cartographie des valeurs de répartition des pressions - patient 80 kg/172 cm

Système de mesures X-Sensor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM MINI / MAXI*	POIDS PATIENT KG	HOUSSE	NORMES FEU
ALOVA® Galbé Standard	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80	Protection intégrale en promust PU (jersey enduit polyuréthane) noir sur le dessus et argent sur les cotés. Face inférieure anti-dérapante en PU/PVC munie d'une poignée de transport.	Conforme à la norme EN 597-1 et EN 597-2.
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100		
ALOVA® Galbé Multitailles	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120		
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100		
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120		
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135		
ALOVA® Galbé Multitailles XL	VCAG4343XL	43	43	9 < 12	30 à 110		
	VGAG5044XL	50	44	9 < 12	30 à 135		
ALOVA® Galbé Multitailles XXL	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160		
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160		
	VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200		
	VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200		
ALOVA® Galbé Butée Pelvienne	VCAG3841BP	38	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4041BP	40	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 à 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 à 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 à 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 à 135		
	VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120		

* hauteur mini = hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / hauteur maxi = hauteur totale du coussin.

Garantie coussin : 3 ans.

Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

Entretien : Housse Promust PU



FP000044_V3/03-2015

ASKLÉSANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – E-mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

