





- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0004345V
- Code GMDN :

Règle appliquée (annexe IX)






- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non chirurgical
- Non Actif diagnostique
- Non Actif thérapeutique
- Non Actif Médical

Description générale	Panier porte flacon sérum en fil d'acier plastifié avec anse d'accrochage. Modèle ouvert pour le passage du tube d'alimentation.				
Pièces jointes	Oui	Photo, dessin technique			
Référence lot	Non				
Dispositif raccordé	Non				
Dispositif Usage Unique	Non				
Dispositif stérile	Non				
Stérilisation	Non	Non autoclave, non poupinel, non air sec chaud			
Autoclavable	Non				
Nettoyage	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le polyéthylène.			
Substance impropre	Produit attaquant le polyéthylène comme le hydrocarbones halogénés.				
Pièces constitutives	Oui	Pour les modèles avec bouchon = chaînette + bouchon			
Matières	En fil d'acier plastifié blanc en polyéthylène				
Antistatique	Non				
Contient du latex	Non				
Etiquetage	Oui	Référence du produit et désignation sur le sachet, nom, capacité, marquage CE.			
Emballage	Oui	Sous sachet d'une pièce.			
Stockage particulier	Non				
Marquage sur le DM	Non				
Références + extensions		45 400 10R	45 400 25R	45 400 50R	45 400 99R
Désignation		Porte-sérum	Porte-sérum	Porte-sérum	Porte-sérum
Poids net (g)		50	61	66	85
Capacité (ml)		100-125	250	500	1000
Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm		Voir pages suivantes dessin technique			
Resistance température (°C)		Max = + 50 Min = -10			
Couleurs		blanc			
Charge max (kg)		2			
Utilisation		Permet la suspension des flacons en verre ou en plastique à perfusion.			
Mode d'emploi		Mettre le flacon dans le porte flacon le goulot vers le bas et raccorder le tube d'alimentation au flacon par ouverture. Accroché le porte flacon à un pied à perfusion ou à un autre support conforme aux règles de sécurité.			
Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique		Bien accrocher le porte flacon à sérum à son support. Après chaque utilisation mono personnel, nettoyer et désinfecter les fils. Si le plastique est attaqué ou détaché ne plus utiliser le porte flacon, risque de rouille. Capacité de poids maximum 2 Kg.			
Recyclage		Oui			
Récupération		Dans des bacs de déchets médicaux			
DEEE/REACH		Non/Non			
Phtalates		Non			
Données de sécurités		Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul			





Ref.N°: 45 400 10R

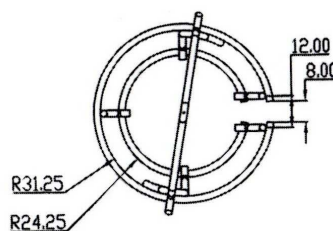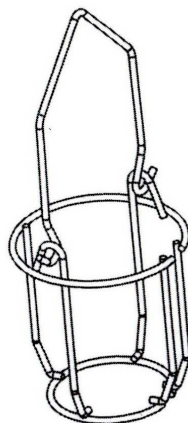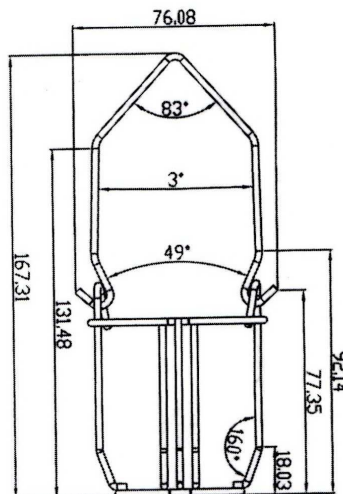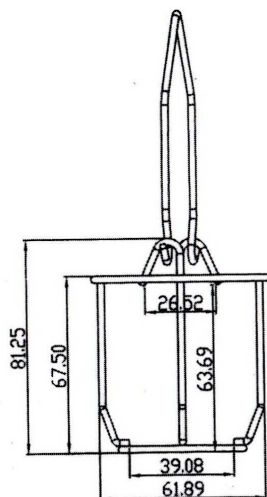

Réf.N° : 45 400 99R

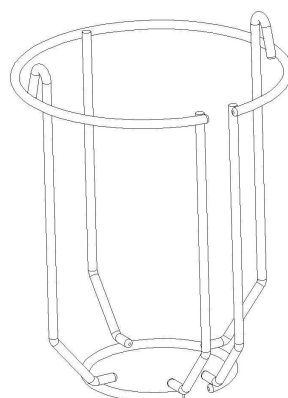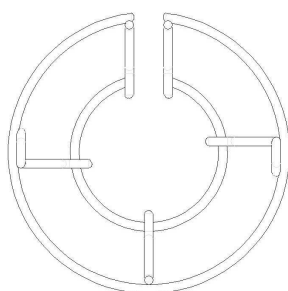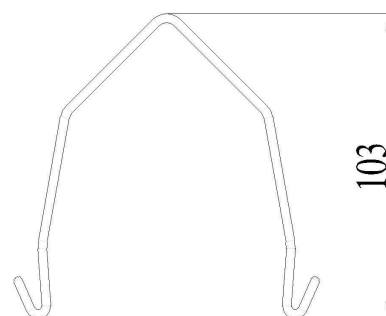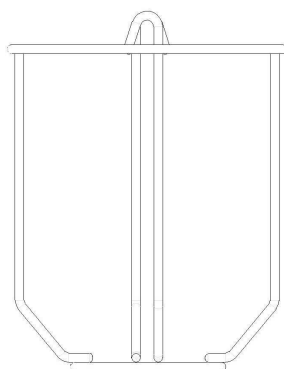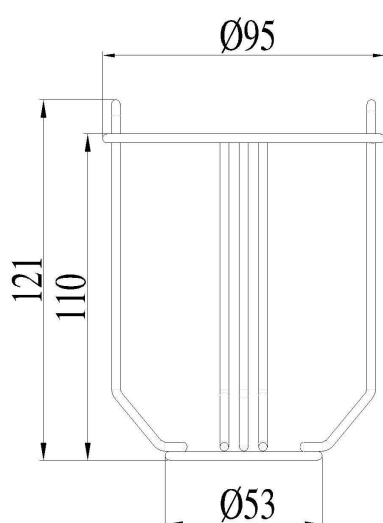

Réf.N°: 45 400 50R

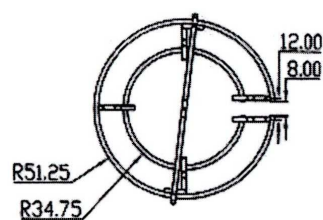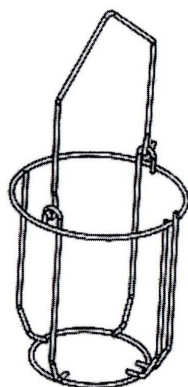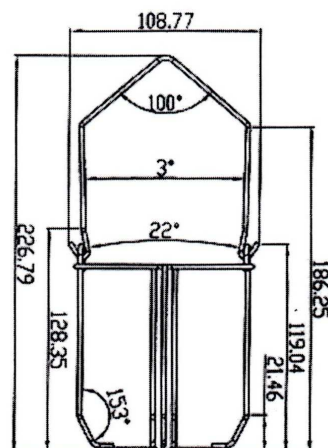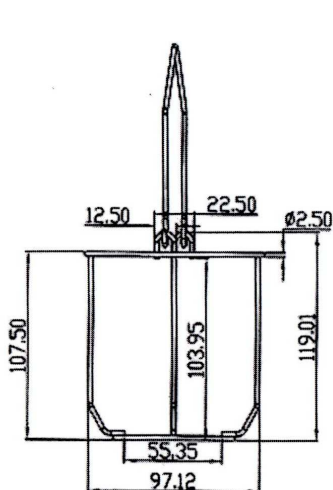

Réf. N°: 45 400 99R

