



1°) Mise en place de la seringue à cône Luer excentré

Remplir la seringue avec le produit à injecter.
Fixer l’aiguille sur le cône luer excentré de la seringue sans retirer le capuchon de protection.
a) Maintenir le Den’hub entre le pouce et les doigts de la main gauche.
b) Enchâsser l’embout de la seringue dans l’étrier en la maintenant entre le pouce et l’index.
Avancer le curseur contre le piston de la seringue et verrouiller celui-ci à l’aide de la manette de commande.

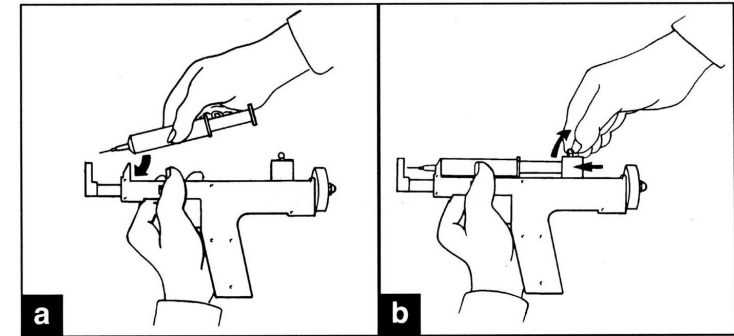


2°) Réglage de la profondeur de pénétration de l’aiguille

Retirer le capuchon de l’aiguille (veiller à ne pas toucher l’aiguille lorsqu’elle est décapuchonnée).
Le réglage s’effectue visuellement. En effet, selon l’aiguille utilisée, la position de la mire peut varier de plusieurs mm pour une même profondeur d’injection désirée.
Prendre le Den’hub de la main droite en maintenant la gâchette à fond et en tenant l’appareil de profil face à vous.
Tourner la molette jusqu’à obtenir le dépassement de l’aiguille de la mire correspondant à la profondeur d’injection désirée.
- En continu : de 1 à 4 mm suivant le traitement et la zone à traiter;
- En automatique : « nappage » 1 mm environ au coup par coup.

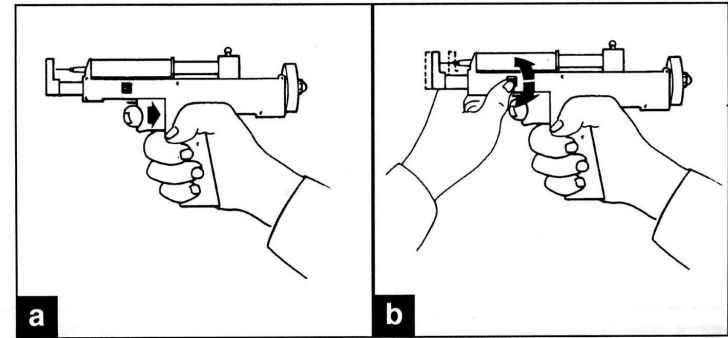


Comment tenir l’appareil
Nota important

Il est recommandé d’éviter la pénétration du produit dans les mécanismes. Pour cela, nous vous conseillons de maintenir et de manœuvrer le pistolet toujours la pointe vers le bas, les produits s’écouleront ainsi vers l’extérieur.

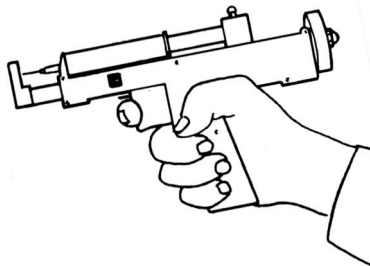


DEN’HUB

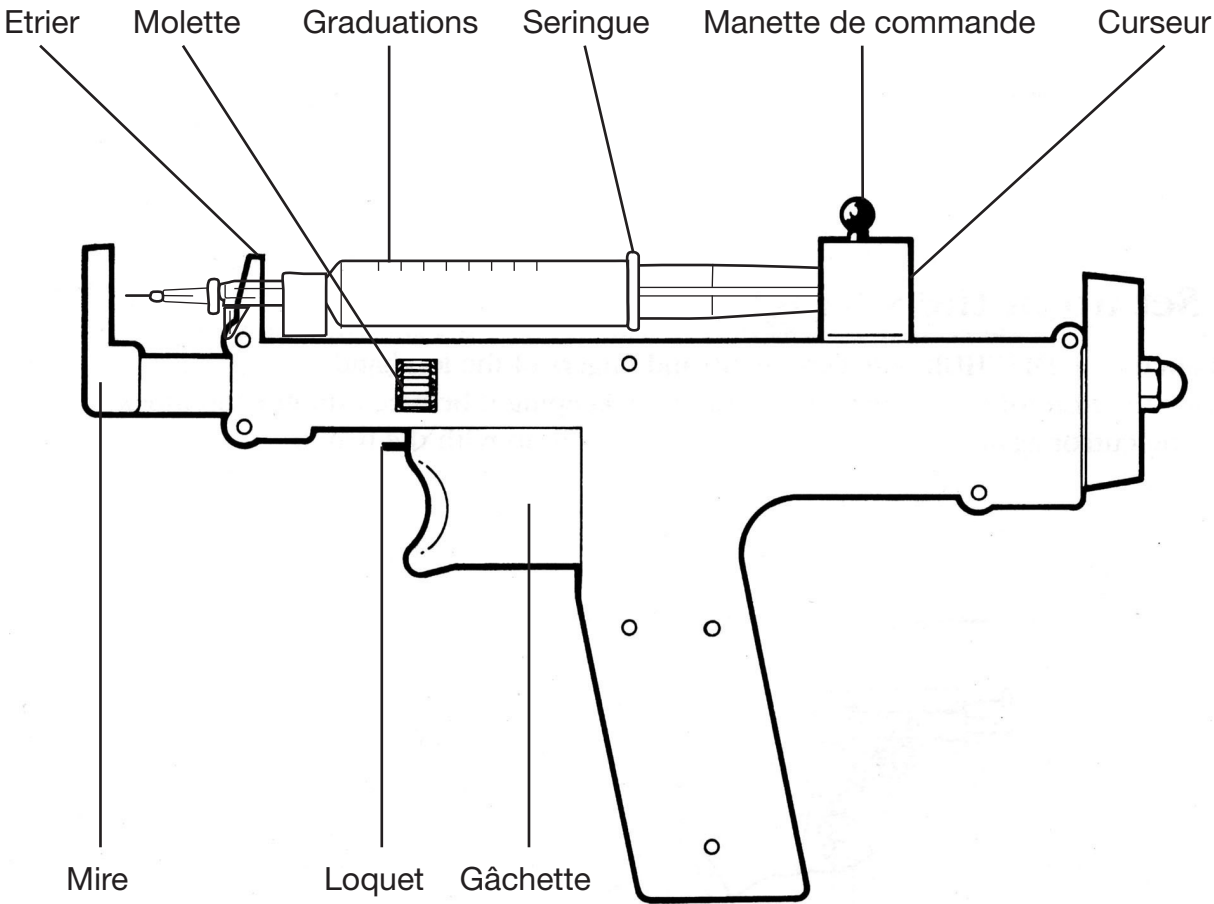


3°) Fonctionnement manuel - continu

a) Maintenir la gâchette à fond de la main droite.
b) Pousser le loquet côté index.
c) Appliquer la mire sur le point à traiter et donner un ou plusieurs coups de gâchette selon la papule désirée.

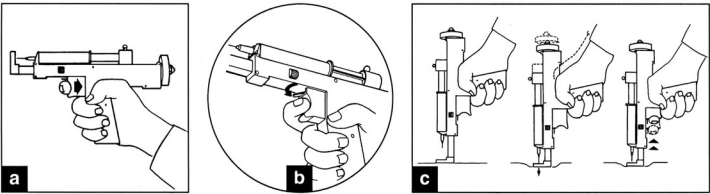


4°) Fonctionnement en automatique - coup par coup

a) Maintenir la gâchette à fond de la main droite.
b) Pousser le loquet côté opposé à l’index.
c) Prendre le Den’hub entre le pouce et les doigts en haut de la crosse, appliquer la mire sur la zone à traiter en appuyant le Den’hub à fond et répéter le geste en déplaçant le pistolet.
d) En tenant l’appareil de cette manière, il est aussi possible de “poncturer sans injecter” en orientant le loquet côté index.

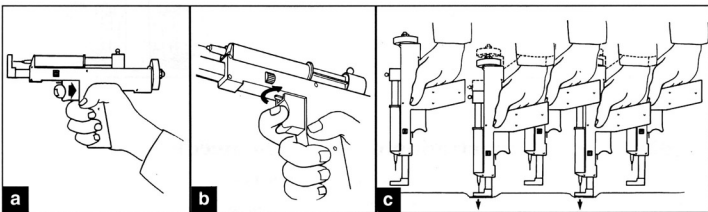

5°) Changement de mire

Déboîter celle-ci en tirant puis enfoncer à fond une autre mire. Si éventuellement l’emboîtement devient plus difficile au bout d’un certain temps d’utilisation, dévisser la tige (indice B) et mettre un peu d’huile de paraffine sur le joint torique, au besoin une petite goutte de paraffine au point A (pour faciliter la rotation de l’axe.)

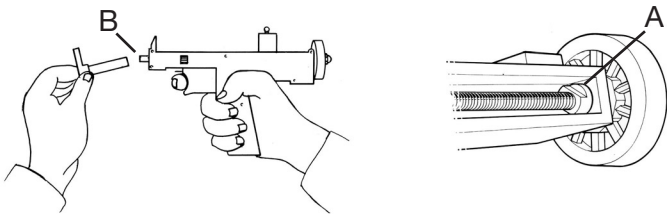


6°) Retrait de la seringue

Reculer le curseur et retirer la seringue en la tirant légèrement vers l’arrière pour la dégager de l’étrier.
Retirer l’aiguille en veillant à ne pas se piquer lors de cette opération.
Les déchets devront être collectés et traités selon la législation en vigueur.

ENTRETIEN

Employer le clean den’hub le soir après avoir enlevé la mire, mettre le den’hub dans un b cher avec l’antiseptique   hauteur des molettes.
Mettre les mires dans l’autre b cher avec un antiseptique apr s les avoir nettoy es.

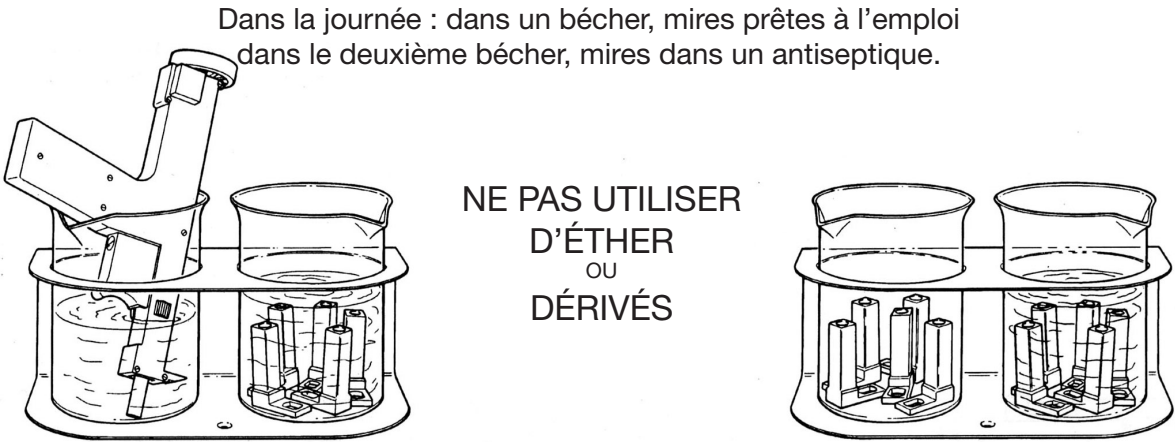

IMPORTANT

la mise en place d’une seringue pr te   l’emploi est n cessaire pour le fonctionnement normal du den’hub.

ATTENTION : A la suite d’une fausse man uvre, l’appareil peut se bloquer. Dans ce cas, sans toucher la g chette, ramener le loquet c t  index.
En cas de r sistance en enfon ant la g chette, v rifier que le curseur ne soit pas en fin de course ou que l’aiguille ne soit pas bouch e.