

NOTICE D'UTILISATION :


Tabouret de douche **PACIFIC** (bleu : SA 211 2006-BLE18 / blanc : SA 211 2006-BLA18)



Lisez attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Dimensions hors-tout (l x p x h)	Maxi.	Mini.
	53 x 47 x 56 cm	51 x 43 x 38 cm
Hauteur sol/siège (au centre)	réglable de 35 à 53 cm (8 positions)	
Dimensions du siège (lxp)	51 x 30 cm	
Diamètre du tube	2,5 cm	
Matière	structure : aluminium - siège : plastique	
Couleur	bleu ou blanc	
Poids	1,9 kg	
Poids maximum supporté	= 136 kg	

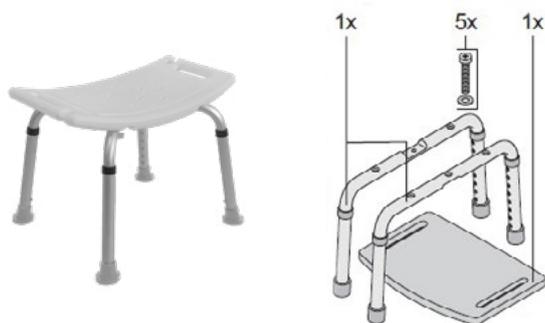


MONTAGE :

1. Positionner les 2 cintres de la structure sous le siège en respectant le sens (parties aplaties placées l'une sur l'autre). Placer une vis + une rondelle au centre des 2 cintres pour les fixer au siège puis terminer l'assemblage en vissant les 4 autres vis + rondelles.


Attention : contrôler que les 5 vis sont correctement serrées avant d'utiliser le tabouret.

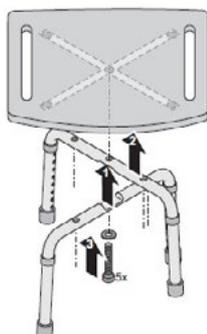

2. Emboîter les 4 pieds en veillant à ce que les boutons poussoirs soient parfaitement et complètement enclenchés dans les trous. S'assurer que les 4 embouts antidérapants soient suffisamment enfoncés.

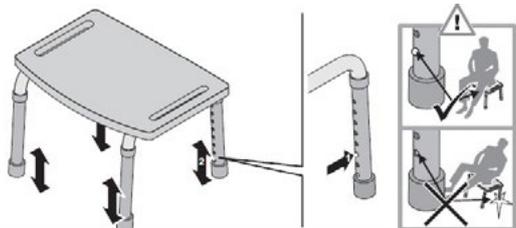

3. Positionner le tabouret de douche contre le rebord intérieur de la douche.

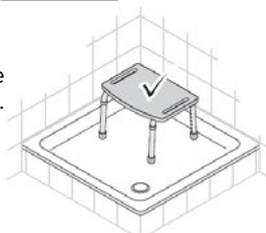

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Essuyer le tabouret après utilisation pour enlever tout excès d'eau. Le stocker dans un local sec et aéré.
- Ce tabouret requiert un nettoyage à l'aide d'un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).

- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le tabouret.
- Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.
- Faire vérifier le tabouret, au moins 1 fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

RECOMMANDATIONS :

- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de **136 kg**.
- Le sol doit être plan, stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant).
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol.
- Vérifier que le tabouret est bien positionné sur ses pieds et qu'il est parfaitement stable.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais déplacer le tabouret si le patient est assis dessus.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Le tabouret est garanti 1 an. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
Qixing Precinct, Xiqiao Town, Nanhai District, 528204 Foshan City,
Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE