



LOS ANGELES
 HONG-KONG
 MONTRÉAL
 MOSCOU
 TOKYO
 MILAN
 PARIS...

La **Pressodermie**[®] : c'est quoi ?

Une **technique innovante**, assistée par appareil, agréable et utilisée en toute sécurité. En se remplissant d'air successivement, les compartiments indépendants, de l'accessoire (botte, manchon...), produisent une "vague" de pressions sur toute la longueur de la zone concernée. Ce mécanisme progressif **active** et **rééquilibre** la circulation.

La **Pressodermie**[®] : des effets durables ?

OUI, grâce à la dynamisation de la circulation. Notre méthode brevetée du "**double gradient de pression**" exerce un "effet drainant". La pérennisation des résultats obtenus est assurée aussi par une hygiène de vie saine et équilibrée.

La **Pressodermie**[®] : combien de temps ?

Chaque séance dure environ 30 minutes pour les jambes ou les bras. La fréquence habituelle est de 2 à 3 séances par semaine. Une cure moyenne requiert 10 à 15 séances.

La **Pressodermie**[®] : sécurité et confort ?

OUI, grâce à la précision des pressions et des séquences programmées sur les zones traitées. L'efficacité du soin et une réelle sensation de bien-être sont ressentis dès la première séance.

Équilibre et légèreté sont en marche...

eureduc
 Leader mondial de la **Pressodermie**[®]
 depuis 1977

35, Rue des Broderies - F-78310 COIGNIÈRES - FRANCE
 TEL. + 33 (0) 134 610 161 - FAX. + 33 (0) 134 614 061
 www.eureduc.eu - info@eureduc.eu

Pressodermie[®]

Douceur & efficacité



www.eur-consulting.biz - Toutes les photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Crédits photo Getty Images. Ne pas jeter sur la voie publique P.03A/MTL 2010-04-02

CYCLE DU DOUBLE GRADIENT DE PRESSION AUTOMATIQUE (DGPA)


L'authentique pressothérapie étagée




Gonflage chambre ① (distal) à 100% de la pression souhaitée.
Zones blanches = absence de pression




Gonflage chambre ② à 100% de la pression souhaitée
+ supplément de pression ch. 1
Différence de pression = sens de circulation des flux

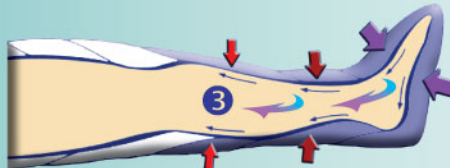

Gonflage chambre ③ à 100% de la pression souhaitée.
Pression chambre 3 < P ch. 2 < P ch. 1

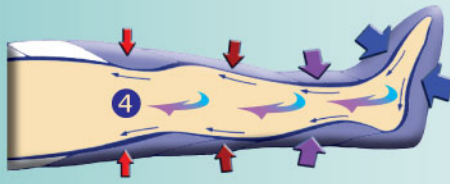


Gonflage chambre ④ à 100% de la pression souhaitée.
Pression chambre 4 < P ch. 3 < P ch. 2 < P ch. 1

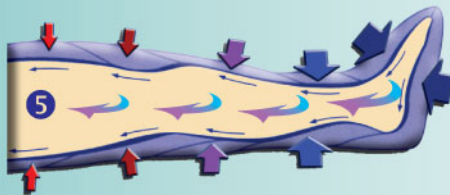

Gonflage chambre ⑤ à 100% de la pression souhaitée.
Fin de cycle de gonflage (Ex : accessoires 5 chambres)
Pression ch. 5 < P ch. 4 < P ch. 3 < P ch. 2 < P ch. 1

Pression finale chambre 5 = pression initiale chambre 1

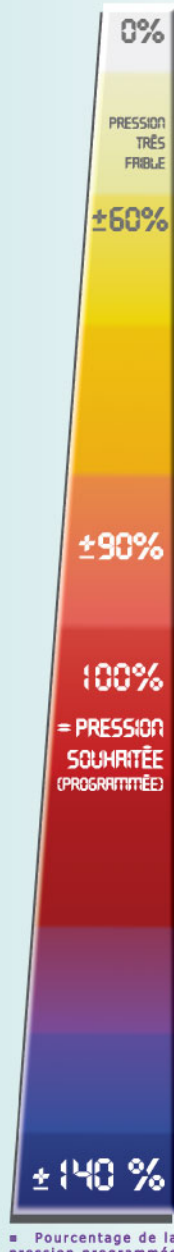

➡ Réactivation d'un flux veino-lymphatique sain (disto-proximal)

La Pressodermie® ...

... lutte-t-elle contre les œdèmes ?

OUI.

Cette technique est systématiquement utilisée dans le monde médical, couplée avec le drainage lymphatique manuel (DLM) et certains types de bandages pour lutter contre les œdèmes et lymphœdèmes les plus sévères.

La **Pressodermie®** favorise la résorption et le transport dans les vaisseaux lymphatiques visant ainsi un rééquilibrage libérateur du système circulatoire (veineux et lymphatique).

... atténue-t-elle les sensations de jambes lourdes et les impatiences ?

OUI.

Par la stimulation du système circulatoire dans son ensemble, ces signes s'atténuent, puis le plus souvent disparaissent au fil des séances de la cure.

La sensation nette de « marcher sur un nuage » est ressentie dès la première application. Le confort et le bien être sont immédiats. Les nombreux programmes assurent une efficacité maximale.

... participe-t-elle à l'élimination de la cellulite ?

OUI.

La cellulite est due à 3 facteurs majeurs :

- le ralentissement de la circulation
- l'augmentation des déchets cellulaires
- la stagnation des molécules d'eau dans le tissu conjonctif

La **Pressodermie®**

- stimule la circulation sanguine (surtout veineuse)
- favorise la circulation lymphatique
- induit une relance naturelle des processus d'élimination

La peau et les tissus bénéficient alors d'un nettoyage en profondeur synonyme de bonne santé, de bien-être et de jeunesse retrouvée.

Les contours se gomment durablement et la silhouette devient plus harmonieuse.

Les nombreux choix de programmes permettent une progressivité des traitements et assurent un résultat optimal.

Œdèmes Remodelage corporel
Troubles circulatoires
Relaxation



Qualité



Performance

Bien-être

