- Attention aux variations physiologiques de la température qui sont à prendre en compte en fonction des résultats : La température augmente de 0,5C° entre 6h et 15h. Les femmes ont une température plus élevée de 0,2C° en moyenne. Leur température varie également en fonction du cycle ovarien. Ainsi elle augmente de 0.5C° en seconde partie de cycle et en début de grossesse.

- En position assise, la température est inférieure de 0.3 à 0.4°C par

rapport à la position debout.

MODALITE DE PRISE DE **TEMPERATURE**

Visez le FRONT. côté temporal droit, à environ 5 cm de distance, pressez la de mesure touche thermomètre, la température s'affiche instantanément.



La fiabilité de mesure n'est pas assurée en cas de prise de température sur une autre région anatomique (ex: bras, torse...)



Avant toute prise de température, et ce afin d'obtenir un résultat stable et fiable :

- Prendre soin de dégager les cheveux
- Essuver la sueur du front
- Eviter les flux d'air (ex : lunettes d'oxygène, climatisation ...)
- Respecter un délai de 1 minute entre deux prises
- A chaque changement d'environnement ayant une différence de température ambiante importante, laisser le Thermo Flash à cette température ambiante pendant au moins 15 min avant son utilisation.