

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Le broyeur électrique Severo® permet de **réduire en une fine poudre les comprimés** les plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des professionnels de santé pour **éviter les troubles musculo-squelettiques** dus au broyage manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Quasi silencieux
- ▶ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ▶ Facilement nettoyable
- ▶ Léger et portable

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Désignation	Référence
Broyeur de comprimés Severo®	NA00030.01
2100 gobelets à usage unique	NA00014.01
2000 couvercles à usage unique	NA00015.01
2100 rondelles cellophane à usage unique	NA00016



Utilisation



Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



Placez une rondelle puis la tête de broyage sur le gobelet. La rondelle est conseillée mais pas obligatoire.



Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients.



Avant de lancer un nouveau broyage, essuyez la tête de broyage avec une lingette sèche à usage unique pour éviter la contamination croisée. Cette étape n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de rondelle.



Visionnez-moi