

THERA-TRAINER TIGO 562

Compatible logiciel THERA-soft

Le THERA-Trainer tigo est un appareil d'entraînement spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Le THERA-Trainer tigo a été développé pour une utilisation quotidienne en clinique ou à domicile et répond aux dernières normes de qualité et de sécurité. Un entraînement actif (avec puissance musculaire), assisté ou passif (avec puissance motrice) est possible.

Pour toutes sortes d'utilisateurs

Le THERA-Trainer tigo a été développé pour les personnes souffrant d'accidents vasculaires cérébraux, de paraplégie, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de traumatismes crânio-cérébraux, etc. Entre-temps, le dispositif d'entraînement est également utilisé avec succès chez les patients après une arthroplastie ou d'autres maladies orthopédiques.

Objectifs importants de la thérapie

- > Activation du système cardiovasculaire
- > Amélioration de l'endurance
- > Activation du métabolisme
- > Maintien et renforcement de la force musculaire
- > Maintien de la mobilité (prophylaxie contractuelle)
- > Régulation du tonus musculaire (spasticité)
- > Stabilisation psychique



Facile à utiliser



Grâce à l'unité de commande et d'affichage ergonomique avec écran couleur de 2,7 pouces, les données de l'exercice peuvent être lues facilement. En plus des touches verte et rouge MARCHE/ARRÊT, il offre toutes les options de réglage nécessaires.

Multitalent ergonomique



Vous pouvez effectuer rapidement et facilement de nombreux réglages sur le THERA-trainer tigo sans aucun outil. De cette façon, vous pouvez par exemple ajuster individuellement la hauteur et l'écart à votre taille.

La qualité allemande

L'origine allemande est synonyme d'une qualité, d'une fiabilité et d'une sécurité optimales. Dès la phase de développement, des tests sont effectués dans nos propres laboratoires de contrôle, ainsi que des vérifications de sécurité sous fortes charges. 95 % de nos fournisseurs triés sur le volet ont leur siège en Allemagne. Afin d'être en mesure de répondre à toutes les exigences des clients, tous les appareils THERA-Trainer sont minutieusement contrôlés avant leur lancement en série dans un contexte de quotidien en clinique.

Spécifications du produit

Unité de base	- Entraînement extrêmement puissant, durable et extrêmement silencieux - Structure métallique solide et stable
Base de l'unité avec roulettes de transport	- Diamètre du rouleau = 75 mm - Extension de l'espace au sol extensible
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	- Fixation des pieds avec contour de sécurité à l'aide de rubans auto-agrippants - Radius de manivelle réglable sur la manivelle droite et la manivelle gauche sur 75 mm ou 110 mm - Facile à laver et désinfecter
Fixation de jambe	- Réglable en hauteur sans outils - Palier articulé - Coussinets de pression doux, biocompatibles, lavables et désinfectables.
Poignée de maintien	- Permet un maintien sûr de l'utilisateur durant l'entraînement - Réglable en hauteur (91,5 - 100,5 cm) et inclinable - Inclus Support pour unité de commande et d'affichage à inclinaison réglable - Poignée dotée d'un revêtement antidérapant en tuyau soft-grip biocompatible - Poignée dotée d'un revêtement facile à laver et à désinfecter
Unité de commande et d'affichage avec écran couleur de 2,7 pouces	- Taille de l'écran 54 x 40 mm - Touches MARCHE/ARRET verte et rouge - Paramètres possibles : Durée de l'exercice (1-180 min) ; sens de rotation (avant/arrière) avec démarrage et arrêt progressifs ; vitesse de rotation du moteur (1-60 U/min) ; résistance d'exercice (niveau 0-15) ; aide à l'accès ; circuit de spasticité (marche/arrêt) - Représentation biofeedback possibles : Affichage de la symétrie (activité droite-gauche) - Valeurs d'entraînement lisibles : Durée de l'exercice ; puissance active, distance, sens de rotation, etc. - Évaluation des résultats de l'exercice : Distance, calories consommées
Divers	- Soutien actif des muscles : Ce volant électronique aide à l'entraînement actif unilatéral ou irrégulier pour un déroulement fluide et harmonieux. Les forces musculaires les plus faibles peuvent être maintenues ou soutenues. - Durée de service Espace domestique = 7 ans - Durée de service Espace clinique = 5 ans

Accessoires fournis : - Set de roues (A001-493)

Options :

- Fixations mécaniques des pieds (A001-777)
- Anti-basculade avec enrouleurs (A003-735)
- Manchettes velcro (A002-440)
- Guide-mollets (A001-428)

Caractéristiques techniques

Dimensions	L x l x h = 83/47,3/110,5 – 120 cm
Poids	32 kg
Branchement	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz 100 V, 50/60 Hz
Moteur électrique - jambes	Puissance nominale = 240 W Énergie consommée = 130 VA Puissance continue = 80 W
Émission de bruit	LpA < 70 dB (A)
Taille autorisée	De 120 cm à 200 cm
Poids autorisé	jusqu'à 180 kg (120 kg avec A001-411)
Classe/ degré/type de protection	Classe II / Type BF / IP21
Classe de produits médicaux	IIa
Marque CE	CE 0297

THERA-TRAINER TIGO 566

Compatible logiciel THERA-soft

Le THERA-Trainer tigo est un appareil d'entraînement spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Le THERA-Trainer tigo a été développé pour une utilisation quotidienne en clinique ou à domicile et répond aux dernières normes de qualité et de sécurité. Un entraînement actif (avec puissance musculaire), assisté ou passif (avec puissance motrice) est possible.

Pour toutes sortes d'utilisateurs

Le THERA-Trainer tigo a été développé pour les personnes souffrant d'accidents vasculaires cérébraux, de paraplégie, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de traumatismes crânio-cérébraux, etc. Entre-temps, le dispositif d'entraînement est également utilisé avec succès chez les patients après une arthroplastie ou d'autres maladies orthopédiques.

Objectifs importants de la thérapie

- > Activation du système cardiovasculaire
- > Amélioration de l'endurance
- > Activation du métabolisme
- > Maintien et renforcement de la force musculaire
- > Maintien de la mobilité (prophylaxie contractuelle)
- > Régulation du tonus musculaire (spasticité)
- > Stabilisation psychique



Facile à utiliser



Grâce à l'unité de commande et d'affichage ergonomique avec écran couleur de 2,7 pouces, les données de l'exercice peuvent être lues facilement. En plus des touches verte et rouge MARCHE/ARRÊT, il offre toutes les options de réglage nécessaires.

Multitalent ergonomique



Vous pouvez effectuer rapidement et facilement de nombreux réglages sur le THERA-trainer tigo sans aucun outil. De cette façon, vous pouvez par exemple ajuster individuellement la hauteur et l'écart à votre taille.

La qualité allemande

L'origine allemande est synonyme d'une qualité, d'une fiabilité et d'une sécurité optimales. Dès la phase de développement, des tests sont effectués dans nos propres laboratoires de contrôle, ainsi que des vérifications de sécurité sous fortes charges. 95 % de nos fournisseurs triés sur le volet ont leur siège en Allemagne. Afin d'être en mesure de répondre à toutes les exigences des clients, tous les appareils THERA-Trainer sont minutieusement contrôlés avant leur lancement en série dans un contexte de quotidien en clinique.

Spécifications du produit

Unité de base	- Entraînement extrêmement puissant, durable et extrêmement silencieux - Structure métallique solide et stable
Base de l'unité avec roulettes de transport	- Diamètre du rouleau = 75 mm - Extension de l'espace au sol extensible
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	- Fixation des pieds avec contour de sécurité à l'aide de rubans auto-agrippants - Radius de manivelle réglable sur la manivelle droite et la manivelle gauche sur 75 mm ou 110 mm - Facile à laver et désinfecter
l'entraînement des membres supérieurs.	- Avec de longues manivelles (110 mm) - Réglable en hauteur (91,5-100,5 cm) et inclinable - Inclus Support pour unité de commande et d'affichage à inclinaison réglable
Adaptateur pour poignée	- Avec fermeture encliquetable, remplaçable facilement sans outillage - Lavable et désinfectable
Poignées ergonomiques	- Trois positions ergonomiques de prise - Avec fermeture encliquetable, remplaçable facilement sans outillage - Lavable et désinfectable
Unité de commande et d'affichage avec écran couleur de 2,7 pouces	- Taille de l'écran 54 x 40mm - Touches MARCHE/ARRET verte et rouge - Paramètres possibles : Durée de l'exercice (1-180 min) ; sens de rotation (avant/arrière) avec démarrage et arrêt progressifs ; vitesse de rotation du moteur (1-60 U/min) ; résistance d'exercice (niveau 0-15) ; aide à l'accès ; circuit de spasticité (marche/arrêt) - Représentation biofeedback possibles : Affichage de la symétrie (activité droite-gauche) - Valeurs d'entraînement lisibles : Durée de l'exercice ; puissance active, distance, sens de rotation, etc. - Évaluation des résultats de l'exercice : Distance, calories consommées

Divers	- Soutien actif des muscles : Ce volant électronique aide à l'entraînement actif unilatéral ou irrégulier pour un déroulement fluide et harmonieux. Les forces musculaires les plus faibles peuvent être maintenues ou soutenues. - Durée de service Espace domestique = 7 ans - Durée de service Espace clinique = 5 ans
Accessoires fournis	Jeu de roues (A001-493)

- Caractéristiques techniques

Dimensions	L x l x h = 90 cm x 63,8 cm x 109,5-120 cm
Poids	32 kg
Branchement	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz 100 V, 50/60 Hz
Moteur électrique - jambes	Puissance nominale = 240 W Énergie consommée = 130 VA Puissance continue = 80 W
Moteur électrique - buste	Puissance nominale = 100 W Énergie consommée = 130 VA Puissance continue = 80 W
Émission de bruit	LpA > 70 dB (A)
Taille autorisée	De 120 cm à 200 cm
Poids autorisé	jusqu'à 180 kg (120 kg avec A001-411)
Classe/type de sécurité	Classe II / Type BF / IP21
Classe de produits médicaux	IIa
Marque CE	CE 0297

Options : - Fixations mécaniques des pieds (A001-777)

- Anti-basculer avec enrouleurs (A003-735)

- Manchettes velcro (A002-440)

- Guide-mollets amovibles (A001-428)

THERA-TRAINER TIGO 632

Compatible logiciel THERA-soft

Le THERA-Trainer tigo est un appareil d'entraînement spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Le THERA-Trainer tigo a été développé pour une utilisation quotidienne en clinique ou à domicile et répond aux dernières normes de qualité et de sécurité. Un entraînement **actif (avec puissance musculaire), assisté ou passif (avec puissance motrice) est possible.**

Pour toutes sortes d'utilisateurs

Le THERA-Trainer tigo a été développé pour les personnes souffrant d'accidents vasculaires cérébraux, de paraplégie, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de traumatismes crânio-cérébraux, etc. Entre-temps, le dispositif d'entraînement est également utilisé avec succès chez les patients après une arthroplastie ou d'autres maladies orthopédiques.

Objectifs importants de la thérapie

- > Activation du système cardiovasculaire
- > Amélioration de l'endurance
- > Activation du métabolisme
- > Maintien et renforcement de la force musculaire
- > Maintien de la mobilité (prophylaxie contractuelle)
- > Régulation du tonus musculaire (spasticité)
- > Stabilisation psychique



Motivation maximale



Évaluation	
Durée de l'exercice :	07:56 min
Part active :	~ 82 %
Activité à gauche :	~ 46 %
Activité à droite :	~ 54 %
Distance :	1,7 km
Nombre de spasmes :	1
Calories :	~ 0,5 kCal
Force moteur début :	~ 0,0 Nm
Force moteur fin :	~ 0,0 Nm

Cinq présentations de biofeedback motivent les utilisateurs lors d'un exercice ciblée. À la fin de l'exercice, le résultat est automatiquement affiché sur **l'unité de commande et d'affichage sur un écran couleur de 7 pouces.**

Multitalent ergonomique



Vous pouvez effectuer rapidement et facilement de nombreux réglages sur le THERA-trainer tigo sans aucun outil. De cette façon, vous pouvez par exemple ajuster individuellement la hauteur et l'écart à votre taille.

La qualité allemande

L'origine allemande est synonyme d'une qualité, d'une fiabilité et d'une sécurité optimales. Dès la phase de développement, des tests sont effectués dans nos propres laboratoires de contrôle, ainsi que des vérifications de sécurité sous fortes charges. 95 % de nos fournisseurs triés sur le volet ont leur siège en Allemagne. Afin d'être en mesure de répondre à toutes les exigences des clients, tous les appareils THERA-Trainer sont minutieusement contrôlés avant leur lancement en série dans un contexte de quotidien en clinique.

Spécifications du produit

Unité de base	- Entraînement extrêmement puissant, durable et extrêmement silencieux - Structure métallique solide et stable
Base de l'unité avec roulettes de transport	- Diamètre du rouleau = 75 mm - Extension de l'espace au sol extensible
Cale-pieds à 2 niveaux Réglage de rayon	- Radius de manivelle réglable sur la manivelle droite et la manivelle gauche sur 75 mm ou 110 mm - Contour de sécurité - Avec rubans auto-agrippants pour fixation des pieds - Lavables et désinfectables
l'entraînement des membres supérieurs.	- Inclus moteur électrique 100 W - Avec de longues manivelles (110 mm) - Réglable en hauteur (83-92 cm) et inclinable - Inclus Support pour unité de commande et d'affichage à inclinaison réglable
Adaptateur pour poignée	- Avec fermeture encliquetable, remplaçable facilement sans outillage - Pour l'utilisation du module d'entraîneur des membres supérieurs comme poignée - Lavables et désinfectables
Poignées ergonomiques	- Trois positions ergonomiques de prise - Avec fermeture encliquetable, remplaçable facilement sans outillage - Lavables et désinfectables
Unité de commande et d'affichage avec écran couleur de 7 pouces	- Écran couleur haute résolution avec technologie TFT et grand clavier à effleurement - Taille de l'écran 155 x 86 mm - Inclinable pour une meilleure lisibilité (pas de réflexion) - Contrôle vocal d'arrêt d'urgence : - Touches MARCHE/ARRET verte et rouge : - Paramètres possibles : - Durée de l'exercice (1-180 min) ; sens de rotation (avant/arrière) avec démarrage et arrêt progressifs ; - vitesse de rotation du moteur (0-60 trs/min) ; - résistance d'exercice (niveau 0-15) ; aide à l'accès ; - circuit de spasticité (marche/arrêt) - Interfaces : 2 x interfaces USB pour la mise à jour du logiciel ; port du casque
Progiciel Cycling thérapie individuelle pour écran couleur 7 pouces	- Des valeurs d'entraînement qui peuvent toujours être lues d'un seul coup d'œil : - Durée de l'exercice ; résistance d'exercice ; - puissance active, distance, sens de rotation, etc. - Programmes de thérapie : - Neuro (programme contrôlé par résistance) ; - Football (adaptation de la vitesse de rotation) ; - Thérapie de groupe (facultatif) - Représentations biofeedback possibles : - Rue (activité droite-gauche) ; Barres (activité droite-gauche) ; Passif (tonus musculaire avant/après l'entraînement) - Évaluation des résultats de l'exercice : - Temps d'exercice ; puissance active totale ; - puissance active droite/gauche ; parcours ; - nombre de spasmes ; consommation de calories ; force moteur début/fin
Options :	- Fixations mécaniques des pieds (A001-777) - Anti-basculer avec enrouleurs (A003-735) - Manchettes velcro (A002-440) - Guide-mollets (A001-428) - Piètement roulettes freinée (A004-312)

Divers	- Soutien actif des muscles : Le volant électronique aide à l'entraînement actif unilatéral ou irrégulier pour un déroulement fluide et harmonieux. Les forces musculaires les plus faibles peuvent être maintenues ou soutenues. - Durée de service - Espace domestique = 7 ans - Durée de service - Espace clinique = 5 ans
Accessoires en option	Jeu de roues (A001-493) ; protection contre l'inclinaison et la distance (A003-735) ; protection des pieds (A001-777) ; protection des jambes (A001-428) ; manchons pour poignée thérapeutique (A002-440) ; accoudoir pour poignées thérapeutiques (A003-724), poignée spéciale Tetra (A004-241), accoudoir avec poignée en forme de tige y compris manchons (A001-426) ; logiciel CL thérapie de groupe de base (A004-246) ; logiciel CL thérapie de groupe avancée (A004-247) ; mise à niveau logicielle CL thérapie de groupe avancée (A004-261) ; THERA-soft (A006-630) ; récepteur radio pour unité de commande et d'affichage (A006-672) ; mini-PC (A002-425) ; piètement roulette freinées (A004-312)

Caractéristiques techniques

Dimensions L x L x H = 90 / 63,8 / 106 - 116 cm

Poids	38 kg
Raccordement réseau	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz 100 V, 50/60 Hz Puissance nominale = 240 W Énergie consommée = 130 VAPuissance continue = 80 W
Moteur électrique - jambes	Puissance nominale = 100 W Énergie consommée = 130 VA Puissance continue = 80 W
Moteur électrique - buste	
Émission de bruit	LpA < 70 dB (A)
Taille autorisée	De 120 cm à 200 cm
Poids autorisé	180 kg
Classe / type de sécurité	Classe II / Type BF / IP21
Classe de produits médicaux	Ila
Marque CE	CE 0297

[illegible]



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 562		Membres inférieurs
Référence 230 V	A003-882	
EUR hors TVA	3 895,00	

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	•	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 745, ,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 564		Membres inférieurs
Référence 230 V	A003-839	
EUR hors TVA	3 910,00	

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage de rayons illimités	A001-411	•	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00

THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 745,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 566		Membres inférieurs et supérieurs
Référence 230 V		A003-128
EUR hors TVA		4 685,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	•	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Manchettes velcro	A002-440		160,00
Repose-bras poignée cylindrique	A002-757		380,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 745,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 568		Membres inférieurs et supérieurs
Référence 230 V		A005-233
EUR hors TVA		5 185,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage de rayons illimités	A001-411	•	
Unité de commande et d'affichage radio 2,7"	A004-517	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Manchettes velcro	A002-440		160,00
Repose-bras poignée cylindrique	A002-757		380,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 745, ,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 630		Membres inférieurs
Référence 230 V		A008-011
EUR hors TVA		4 335,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	•	
Unité de commande et d'affichage 7"	A004-652	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-soft	STATIONVIDEO		3 745, 00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 556		Membres inférieurs
Référence 230 V	A004-161	
EUR hors TVA	4 635,00	

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage de rayon illimités	A001-411	•	
Unité de commande et d'affiche 7"	A004-652	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655, 00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-soft	STATIONVIDEO		3 745, 00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672		35,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 632		Membres inférieurs et supérieurs
Référence 230 V		A008-013
EUR hors TVA		5 665,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage du rayon à 2 niveaux	A001-409	•	
Unité de commande et d'affichage 7"	A004-652	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Manchettes velcro	A002-440		160,00
Repose-bras poignée cylindrique	A002-757		380,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 745, 00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672		35,00



• = équipement de série

THERA-Trainer tigo 560

Membres inférieurs et supérieurs

Référence 230 V

A003-989

EUR hors TVA

5 885,00

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Cale-pieds avec réglage de rayons illimités	A001-411	•	
Unité de commande et d'affichage 7"	A004-652	•	
Anti-bascule	A003-735		510,00
Fixations mécaniques	A001-777		505,00
Guide-mollets	A001-428		215,00
Manchettes velcro	A002-440		160,00
Repose-bras poignée cylindrique	A002-757		380,00
Piètement roulettes freinées	A004-312		655,00
Socle de réhausse	A002-753		540,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3 747, 00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672		35,00



THERA-soft®
connectable+ 

THERA-Trainer tigo 640

Référence 230 V	A008-728
EUR hors TVA	7.800,00

● = équipement de série

Description de l'article	Référence	Équipements	EUR sans TVA
Unité de base 230 Volt	A000-525	●	
Piètement avec roulettes tigo	A003-723	●	
Anti-bascule	A003-735	●	
Cale-pieds la paire, avec réglage	A001-411	●	
Porte-outil	A003-717	●	
Fixations mécaniques	A001-777	●	
Guide-mollets	A001-428	●	
Entraîneur des membres supérieurs	A001-416	●	
Manivelles longues (110 mm)	A001-417	●	
Adaptateurs entraîneur des membres	A001-419	●	
Poignées thérapeutiques pour entraîneur	A001-420	●	
Repose-bras avec poignée cylindrique	A002-757	●	
Manchettes velcro pour poignées	A002-440	●	
Écran couleur 7" tigo	A004-652	●	
Logiciel écran 7" tigo	A004-712	●	
Repose-bras pour les poignées ergonomiques	A003-724		380,00
Poignée spéciale Tetra	A004-241		435,00
Manchettes pour repose-bras avec poignée verticale	A001-427		130,00
Repose-bras avec poignée verticale incl manchette	A001-426		490,00
THERA-soft	A006-630		655,00
Station vidéo THERA-Soft	STATIONVIDEO		3.745,00
Récepteur radio pour unité d'affichage et de commande	A006-672		35,00



THERA-Trainer tigo présenté avec le piètement roulettes freinées (A004-312)