

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

"GUIDON DE TRANSFERT"

RÉFÉRENCES : SIGUIDA EVOL / SIGUIDA XL



La plateforme AUTOMAX® est un guidon permettant le transfert autonome d'un patient, sans l'aide d'une tierce personne.

Issu de travaux de rééducateurs spécialisés en ergomotricité, AUTOMAX® dispose d'une barre d'appui réglable en hauteur et réversible permettant ainsi de répondre à un plus grand nombre de besoins du patient.

Dans certains cas, comme par exemple en phase d'apprentissage pour la reprogrammation des schémas moteur, il est nécessaire qu'une tierce personne reste vigilante aux risques de perte d'équilibre ■

LES + PRODUIT

Le transfert autonome actif permet de maintenir le schéma moteur.

Diverses formes de préhension grâce à la double barre.

Stabilité importante due au bon rapport encombrement / surface.

Déplacement à vide aisé grâce aux roulettes.

Existe en version XL.



OPTIONS

SANGLE SANGO La sangle dorso lombaire permet, de façon ergonomique, de sécuriser le patient verticalisé. Réf : SANGO



EMPREINTES Empreintes de pas antidérapantes autocollantes pour AUTOMAX® (une paire de pas et une forme papillon). Réf : SIGUITRA

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

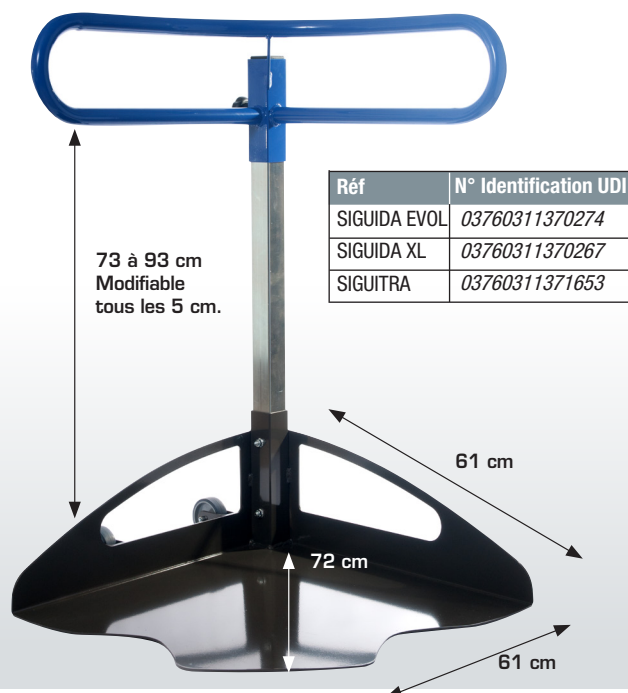

PRODUIT :	AUTOMAX®
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIGUIDA EVOL / SIGUIDA XL / SIGUITAB / SIGUITRA
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	21 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG / (200 KG POUR LE MODÈLE XL)
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Transfert et verticalisation autonome d'un sujet sans l'aide d'une tierce personne.</p> <p>Veiller à régler la barre d'appui à la bonne hauteur.</p> <p>Doit être utilisé à plat sur une surface plane. Aucun obstacle ne doit être présent dans le périmètre.</p> <p>Aux WC, une des deux encoches semi-circulaires de la base doit épouser la colonne de la cuvette.</p> <p>Utiliser avec des chaussures non glissantes ou pieds nus.</p> <p>Vérifier le serrage de la molette indexée.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Ne jamais déplacer le Guidon AUTOMAX® avec une personne dessus.</p> <p>Ne jamais s'asseoir sur la barre d'appui du guidon.</p> <p>Ne pas utiliser dans un environnement humide.</p> <p>TABLETTE : La tablette amovible SIGUITAB® ne peut être utilisée que sur les deux plus hautes positions de réglage en hauteur de la barre d'appui. Ne pas utiliser la tablette amovible en ayant inversé la position de la barre d'appui. Ne pas poser d'objets dont la température dépasse la température ambiante.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
PIÈCES D'USURES :	<p>Roulettes, empreintes de pas.</p>
COMPOSITION :	<p>AUTOMAX® : Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PE,</p> <p>PVC TABLETTE : Polypropylène qualité alimentaire, PVC, acier.</p> <p>EMPREINTES : PVC</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant 1 guidon de transfert AUTOMAX®, sa fiche technique et sa notice de montage.</p>
COULEUR :	<p>Bleu</p>