



Upgrade your wheelchair

acekare

# Yomper+



## Notre secret : une position centrale unique

Démarrez-le et découvrez de **nouvelles expériences**. Avec ou sans le moteur allumé, le **Yomper** se fait **complètement oublier**. La roue motrice est fixe, ne rajoute aucun frottement et reste **toujours** dans la **meilleure position de déplacement**.

## Les avantages qui font la différence



## Un usage intuitif et rassurant

Une technologie fiable pour une **conduite sûre**. Propulsez-vous **sans efforts** sur de longues distances et dans des lieux auparavant inaccessibles.

**Vraiment discret**, le Yomper est compatible avec la majorité des fauteuils rigides ou pliables.



### Adaptez votre conduite

Votre besoin change, le Yomper+ s'adapte : 2 modes, intérieur et extérieur. 5 vitesses par mode.



### Une commande EasyGo pratique !

Goûtez à une conduite **dynamique**, attachée au fauteuil ou à la cuisse, la télécommande EasyGo est votre meilleure amie pour un quotidien **sans efforts**.



### Installez-le très facilement

Ses 2 petites roues à l'avant le rendent stable et permettent de le mettre en place sans effort. La poignée est surélevée pour une installation optimale.

# La roue motrice Yomper+

## Poignée

La poignée est surélevée pour une installation depuis votre siège (voiture, lit etc.)

## Bouton de mise en tension

## Batterie Lithium-ion

- Avec témoin de charge
- Garantie 2 ans

Connecteur commande Tierce personne

## Moteur 250W

Confortable et facile à remplacer

## Roue avant

Les 2 petites roues à l'avant rendent le Yomper stable et permettent de le mettre en place sans effort

# La télécommande EasyGo

## Écran OLED

- Niveau de batterie
- Affichage des paramètres

Batterie rechargeable USB

2 clics pour démarrer  
1 pour arrêter



Connexion Bluetooth sans fil

## Bouton de vitesse +/-

- 5 vitesses réglables en mode intérieur
- 5 vitesses réglables en mode extérieur

## 5 LED

Affichage de la vitesse sélectionnée et du mode intérieur (vert) ou extérieur (rouge)





# Comment utiliser le Yomper +

Le Yomper+ s'adapte aux différentes situations à l'aide de son système de commande EasyGo. Grâce à lui, vous pouvez choisir le mode intérieur ou extérieur et la vitesse, même en roulant.

Le boîtier de commande est dit mécanique et une simple pression de la main suffit à propulser le fauteuil. Un double appui bref permet la mise en route du Yomper+ tandis qu'un appui prolongé permet le changement de mode.

	Je démarre	Je choisis la vitesse	Je m'arrête*
Mode intérieur et extérieur (5 vitesses paramétrables)	J'appuie 2 fois sur le bouton	Avec le sélecteur de vitesse +/-	J'appuie sur le bouton <small>*(en mode intérieur l'arrêt peut se faire avec les mains courantes)</small>

## Indications générales

Poids utilisateurs max.	Max. 150 kg
Pente maximale	Jusqu'à 16%
Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Compatibilité	Fauteuil à châssis rigide Fauteuil à châssis pliant

## Roue motrice


Puissance du moteur	250 W
5 paliers d'accélération	Réglable via le boîtier
5 paliers de résistance mains courantes	Réglable via le boîtier
5 vitesses intérieur 5 extérieur	Personnalisable 0 à 10 km/h (directement via le boîtier de commande)

## Batterie

Batteries de série	24V6Ah lithium-ion
Autonomie	23 km (160Wh) 35 Km (240Wh)
Étanche, sans entretien, se recharge en 4h, garantie de 24 mois, conforme à la réglementation des transports aériens (cabine)	



## Poids

Yomper+	5,8 kg
Télécommande EasyGo 	87 g
Poids sans batterie	4,65kg

## Options

Variateur tierce personne	
Batterie haute capacité	24V240Wh Lithium-ion (+350g) Autonomie de 35 km

