

# 692

## Rampes pliables

Charger un scooter dans une voiture devient facile grâce à ces rampes pliables. Elles vous permettent de charger ou décharger des scooters ou des fauteuils roulants, même lourds, dans votre véhicule.



Sac de rangement inclus. Un jeu de rampes 692 contient 2 rampes.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

## Caractéristiques techniques 692

1800	920	370	290	50	9 kg per pièce	150 kg per pièce

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

**01** Poignées pour transporter les rampes facilement

**02** Surface antidérapante pour une meilleure adhérence du fauteuil roulant ou du scooter

Charge maximale **03**  
150 kg par rampe

### Utilisation des rampes

Les rampes sont très faciles à utiliser :

1. Dépliez la rampe.
2. Placez le revêtement antidérapant sur le bord du coffre ou de la surface à franchir.
3. Assurez-vous que les rampes sont stables
4. Conduisez le scooter ou le fauteuil roulant à vide sur les rampes

**04** Fourni avec un revêtement antidérapant pour une meilleure adhérence des rampes



#### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin  
Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89

[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

#### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
Tél.: 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité



Sous réserve de modifications techniques