

s-max



s-max

Le monte escaliers électrique
pour votre fauteuil roulant

- franchir les escaliers dans votre fauteuil roulant
- pas de transfert
- adaptable à la plupart des fauteuils roulants manuels
- manipulation en toute sécurité
- facilement transportable

Euromove



La mobilité augmente votre qualité de vie.

Franchissez les escaliers assis dans votre fauteuil roulant.

Dans la vie quotidienne les escaliers sont un obstacle fréquent : à l'école, au travail, à la maison ou lors de vos sorties. Le monte escaliers **s-max** vous aide à franchir les escaliers partout confortablement et en toute sécurité. Sans transfert, votre accompagnant vous descend ou vous monte sans effort dans les escaliers. La manipulation du **s-max** est simple et nécessite peu d'effort. Léger et compact il s'utilise partout quotidiennement.

Une technologie innovante au service des personnes à mobilité réduite : des **freins automatiques** arrêtent le **s-max** en bord de marche et permettent ainsi à l'accompagnant de manipuler le système en toute sécurité. La fonction **smart-step** assure un confort d'utilisation maximal : la jambe d'appui se pose doucement sur la marche ce qui évite les petits chocs lors du changement d'appui. Le **s-max** est équipé de leds qui éclairent l'escalier dans l'obscurité. Un **chip de sécurité** permet de bloquer l'utilisation du **s-max**.

La vitesse de montée ou de descente est **réglable** en fonction de la situation rencontrée. Il est également possible de choisir la fonction marche par marche : dans ce cas le moteur s'arrête après

chaque marche franchie. Ceci permet à l'accompagnant de bien se positionner dans l'escalier.

Le **s-max** est installé rapidement. Quelques manipulations suffisent pour fixer le monte-escalier au fauteuil roulant. Le **s-max** peut être adapté sur la plupart des fauteuils roulants manuels à partir d'une largeur d'assise de 38 cm*.

La livraison du **s-max** comprend le bloc moteur, la poignée, le pack batterie et le chargeur.

Le **SDM7** est un support universel pour fauteuil roulant manuel.

Le **Sella** est une version **s-max** avec un siège intégré.

*l'adaptabilité dépend de la marque et du modèle du fauteuil roulant



Données techniques	s-max 135	s-max 160
Charge maximale	155 kg ¹	180 kg ¹
Poids maximal de la personne	115 kg	135 kg
Vitesse de montée	5 - 20 marches / mn (réglable en continu)	8 - 23 marches / mn (réglable en continu)
Autonomie avec une charge moyenne de 75 kg	+/- 26 étages (+/- 390 marches)	+/- 20 étages (+/- 300 marches)
Hauteur de marche maximale / augmenté	220 / 235 mm (option)	220 / 235 mm (option)
Largeur poignées / bloc moteur	520 / 321 mm	520 / 370 mm
Profondeur poignées / bloc moteur	230 / 320 mm	230 / 320 mm
Hauteur min. / max.	1150 / 1550 mm	1200 / 1650 mm
Batteries	2 x 12 V / 3,3 Ah	2 x 12 V / 3,3 Ah
Moteur à courant continu	24 V / 200 W	24 V / 275 W
Poids bloc moteur	15,8 kg	16,9 kg
Poids poignées	3,2 kg	3,2 kg
Poids de deux accoudoirs	-	-
Poids pack batteries	3,0 kg	3,0 kg
Poids total	22 kg	23,1 kg

¹ Veuillez respecter le poids maximal du fauteuil roulant.



Euromove

Euromove sprl

45, rue du Hameau
B-1640 Rhode St Genèse
Tél. : 02 - 358 59 86
Fax : 02 - 358 59 51
info@euromove.be
www.euromove.be

Euromove France sarl

10 avenue de la Créativité
F-59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. : 0800 - 86 30 61 (N° vert)
Fax : 00322 - 358 59 51
info@euromove.fr
www.euromove.fr