



Chaises de douche et de toilettes à roues

Notre gamme de chaises de douche et de fauteuils garde-robe mobiles sont de belle apparence, confortables et faciles à utiliser. Les produits simplifient les activités quotidiennes de l'utilisateur en lui permettant de s'occuper de son hygiène intime. De même, le personnel soignant est également avantage grâce à de meilleures conditions de travail.

Les chaises sont utilisées dans des environnements humides où la durabilité et la qualité sont des facteurs clés. Tous les produits sont donc conçus à partir de matériaux résistants.

Chaises de douche/fauteuils garde-robe Clean

La gamme Clean est la nouvelle génération de chaises de douche/fauteuils garde-robe offrant confort et sécurité et qui sont faciles à utiliser. Le moindre élément de la chaise a été conçu pour faciliter la vie des utilisateurs et du personnel soignant. Clean n'est pas doté de soudure, ni de trous, ce qui réduit les risques de corrosion. Ceci fait de Clean un produit très durable.

Transferts plus faciles avec Clean

Le siège est doté d'une découpe à l'avant et est entièrement ouvert à l'arrière. Cela présente un avantage à la fois pour l'utilisateur et le personnel soignant car l'hygiène intime est rendue plus facile à effectuer.

Les repose-bras peuvent être enlevés tandis que le repose-pieds se glisse très facilement sous le siège. Cela rend le transfert plus facile et plus sûr. Nous proposons une panoplie d'accessoires que vous pouvez ajouter à votre Clean.



Le Clean est compatible à la fois aux toilettes fixées au sol ou murales.


Description	Pièce n°	Gris
Clean 44 cm		
4 roulettes verrouillables	8020 9209	8020 9269
Clean 49 cm		
4 roulettes verrouillables	8020 9210	8020 9270
2 roulettes verrouillables	8020 9213	8020 9273
4 roulettes verrouillables, boîtier double	8020 9220	---
2 roulettes verrouillables, boîtier double	8020 9223	---
Clean 55 cm		
4 roulettes verrouillables	8020 9211	8020 9271
2 roulettes verrouillables	8020 9214	8020 9274
4 roulettes verrouillables, boîtier double	8020 9221	---
2 roulettes verrouillables, boîtier double	8020 9224	---
Clean 60 cm		
2 roulettes verrouillables incl		
Cales de surélévation	8020 9215	8020 9275

Matériaux Châssis : Tube en acier revêtu de peinture epoxy
Siège/dossier : Polypropylène
Repose-bras : Polypropylène
Repose-pieds : Polypropylène
Roulettes : Polyamide
Roulettes, verrouillables, avec roulement à bille : Polyamide/TPE

Poids 14 kg

Entretien Nettoyage régulier plus inspection des roulettes

Design Design A&E

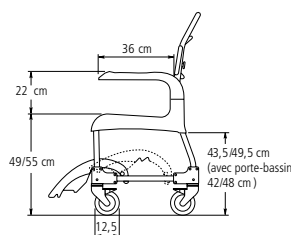


Autres dimensions

Largeur totale : 52 cm

Largeur entre les repose-bras : 43,5 cm

Largeur du siège : 48 cm

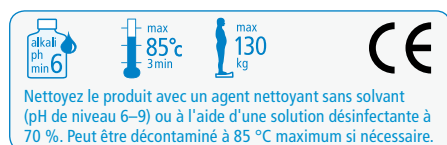

Fauteuil de douche/garde-robe roulant Clean, hauteur réglable

Le fauteuil à hauteur réglable Clean est la nouveauté de cette gamme. La hauteur peut être ajustée de manière à ce que le fauteuil puisse être placé juste au-dessus des toilettes ou pour simplifier les transferts. Le moindre élément de la chaise a été conçu pour la rendre fonctionnelle, sûre et facile à utiliser par les utilisateurs et les personnel soignant.

Réglable entre
47,5 et 60 cm




Description	Pièce n°
Clean à hauteur réglable	8020 9208

Matériau	Châssis : Tube en acier revêtu de peinture epoxy
	Siège/Dossier : Polypropylène
	Repose-bras : Polypropylène
	Repose-pieds : Polypropylène
	Roues, roulettes verrouillables, billes : Polyamide/TPE/Tube non rouillé

Poids 14,2 kg

Entretien Nettoyage régulier plus inspection des roulettes

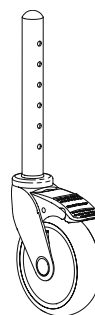

La hauteur de la chaise
Clean est réglable par
incréments de 2,5 cm.

Transferts aisés

Les repose-bras sont amovibles et peuvent être penchés sur les côtés pour faciliter les transferts. Le repose-pied peut facilement être poussé sous le siège ce qui simplifie grandement les transferts latéraux et vers l'avant.

Sûre et confortable


Etant donné que le repose-pied est continuellement relié à la chaise, l'utilisateur ne risquera jamais d'être assis sans appui pour ses pieds. Pour plus de confort et de sécurité, il existe plusieurs accessoires disponibles.

Ajustement facile de la hauteur

La hauteur du siège de la chaise Clean est réglable entre 47,5–60 cm, par incréments de 2,5 cm. La hauteur est facilement ajustée à la main sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser des outils.

Facile à manipuler

La chaise Clean est facile à manipuler et à orienter dans les espaces confinés. Le design du siège offre une bonne accessibilité et facilite l'hygiène intime. De plus, la hauteur réglable de la chaise Clean permet à cette dernière d'être compatible avec la plupart des toilettes, qu'elles soient fixées au sol ou murales, quelle que soit leur hauteur.

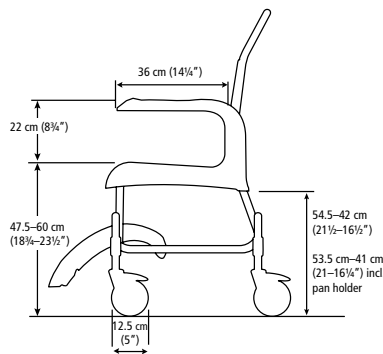


Autres dimensions

Largeur totale : 55 cm

Largeur entre les repose-bras : 43,5 cm

Largeur du siège : 48 cm

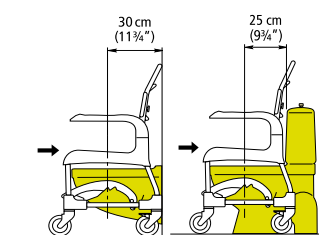

La chaise Clean est compatible avec les toilettes fixées au sol et murales.

 alkali
pH
min 6

 max
85°C
3min

 max
130
kg




Nettoyez le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH de niveau 6–9) ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70 %. Peut être décontaminé à 85 °C maximum si nécessaire.

Clean 24" — facile à manipuler

Le Clean 24" est une chaise de douche solide, facile à déplacer et qui offre indépendance à son utilisateur. Le siège est entièrement ouvert à l'arrière et permet à l'utilisateur d'effectuer sa toilette intime sans assistance.

Les transferts latéraux peuvent être réalisés en toute sécurité grâce à suffisamment d'espace sur le siège, devant les roues. De plus, les manettes de frein sont assez longues mais toujours en dessous du siège.

Avec un adaptateur de roue arrière, la chaise Clean dont la hauteur du siège est de 55 cm peut être transformée en une chaise Clean 24". Nous proposons une panoplie d'accessoires que vous pouvez ajouter à votre Clean 24".

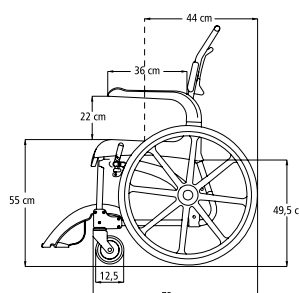

Autres dimensions

Largeur totale : 69 cm

Largeur entre les repose-bras : 43,5 cm

Largeur du siège : 48 cm



reddot



Matériau Châssis : Tube en acier revêtu de peinture epoxy
Siège/dossier : Polypropylène
Repose-bras : Polypropylène
Repose-pieds : Polypropylène
Roulettes : Polyamide
Roulettes pivotantes, équipées de roulements à billes : polyamide/TPE
Roues arrières : Polyamide, équipées de roulements à billes

Poids 20 kg

Entretien Nettoyage régulier plus inspection des roulettes

Design Design A&E

Description

Clean 55 cm
avec roues arrières de 24"

Pièce n°
Vert

Gris

8020 9216 8020 9276



Nettoyez le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH de niveau 6–9) ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70 %. Peut être décontaminé à 85 °C maximum si nécessaire.

Accessoires



Bassin
Vert 8020 9230
Gris 8020 9254

Couvercle avec manche
Vert 8020 9232
Gris 8020 9256

Bassin dotée d'un couvercle avec manche
Vert 8020 9231
Gris 8020 9255

Matériau : Polyamide



Support de bassin
Vert 8020 9233
Gris 8020 9257
Compatible avec les bassins Clean et les bassins hospitalières avec un rebord fin.

Support pour seau
Vert 8020 9234
Gris 8020 9258
Compatible avec les seaux à bord fin.

Matériau : Polypropylène



Attache pour bassin/seau de faible encombrement
Vert 8020 9235
Gris 8020 9259
Fixée sur le support de la bassin.

Matériau : Polypropylène



Coussin souple
Vert 8020 9236
Gris 8020 9260
Siège souple réfléchissant la chaleur et anti-glissements même mouillé.
Largeur de l'ouverture : 20 cm
Matériau : Polyéthylène cellulaire



Coussin, Protect 8020 9245
Coussin gonflable RoHo avec d'excellentes propriétés de limitation de la pression. La pression de l'air est réglable.
Largeur de l'ouverture : 21 cm
Matériau : Néoprène



Coussinet Comfort 8020 9248
Coussinet pour siège, confortable et hygiénique qui réduit légèrement le trou. Facile à nettoyer.
Largeur de l'ouverture : 18 cm
Matériau : Polyuréthane



Couvre-siège 8020 9247
Lorsque vous avez besoin d'un siège sans trou. Facile à nettoyer.
Matériau : Polyuréthane



Ceinture de sécurité 8020 9034
Attachée à l'arrière du dossier.
Matériau : Polyester



Coussin dossier souple
Vert 8020 9238
Gris 8020 9261

Coussin dossier souple réfléchissant la chaleur qui offre plus de confort à l'utilisateur.

Matériau : Polyéthylène cellulaire



Porte-savon
Vert 8170 1140
Gris 8020 9266

Fixé sur la partie latérale de la chaise. Ainsi, le savon est facile à atteindre.
Support intégré pour la manette de douche.



Barre transversale 8020 9246

Reliée aux repose-bras.

Matériau : Aluminium, cellulaire polyéthylène, polypropylène



Cales de surélévation 8020 9243

Elles élèvent le siège de cinq centimètres. Incompatibles avec la chaise Clean 24" à roues arrière ou la chaise Clean à hauteur réglable.

Matériau : Aluminium



Roulettes verrouillables de 80 mm, 2 pièces. 8020 9240

Elles réduisent la hauteur du siège de 5 centimètres. Elles sont standard sur le Clean 44 cm. Incompatibles avec la chaise Clean 24" à roues arrière ou la chaise Clean à hauteur réglable.

Matériau : polyamide/TPE



Adaptateur de roue arrière 8020 9242

Uniquement compatible avec une chaise Clean dont la hauteur du siège est de 55 cm.

Matériau : Aluminium, polyamide



Repose-jambes réglable, rabattable
Pièce n° 8020 9252 (jambe droite)
Pièce n° 8020 9253 (jambe gauche)

Attaches incluses. Uniquement compatible avec la chaise Clean à hauteur réglable.

Matériau du repose-jambes : Plastic ABS



Repose-pied rabattable, paire 8020 9250

Amovible, à hauteur réglable. Attaches incluses. Uniquement compatible avec la chaise Clean à hauteur réglable.

Matériau du repose-pieds : Polypropylène