

EVOLV



Nouveau
code LPP
6274230

DGK MÉDICAL

Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE

Tél	03	21	89	49	85
Mob	06	87	09	92	70

SUR INTERNET

commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com
Facebook : @DGK Medical

EVOLV

EASYSTAND

DEBOUT POUR CHANGER LA VIE

L'EasyStand Evolv est un verticalisateur assis-debout disponible en taille adulte moyen, adulte grand dans deux configurations : **Pack Basic** et **Pack Pro**. Les observations et impressions des utilisateurs et des professionnels sont à la base de la conception de cet appareil modulaire de verticalisation qui met l'accent sur une verticalisation à 90° confortable et thérapeutique, modulable par des réglages sans outillage.

L'Evolv assure une transition sûre vers la station debout à l'aide du support de l'assise et de la tablette suiveuse. Il permet à l'utilisateur de se mettre debout en deux étapes : transfert et verticalisation. Afin de faciliter les transferts en institution, le Pack Pro inclus un châssis avant escamotable, une assise rotative et un dossier amovible. Une fois installé, l'utilisateur peut se mettre debout en toute autonomie par le biais de la télécommande du vérin électrique LINAK.





L'assise rotative facilite les transferts perpendiculaires dans l'appareil. Ce dispositif rotatif se verrouille dans trois positions : dans l'axe et 90° à gauche comme à droite.



Le châssis avant escamotable, la tablette suiveuse et le dossier amovible permettent une utilisation sans encombre du lève-malade sur roulettes ou au plafond.



Caractéristiques techniques :

EVOLV



PHOTO NON CONTRACTUELLE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Taille :	- adulte moyen - adulte grand - XT	122 à 168 cm 152 à 188 cm 183 à 208 cm
Poids max. :	- adulte moyen - adulte grand - XT	90 kg 127 kg 159 kg
Profondeur de l'assise : - à partir du pivot d'assise	- adulte moyen cm - adulte grand - XT	36 à 48 cm 41 à 53 cm 48 à 61 cm
Hauteur assise/repose pied : - à partir du pivot d'assise	- adulte moyen - adulte grand - XT	28 à 46 cm 36 à 53 cm 43 à 58 cm
Profondeur support-genoux : - à partir du pivot d'assise	- adulte moyen - adulte grand - XT	9 à 15 cm 12 à 18 cm
Hauteur d'assise :	- adulte moyen/grand - XT	55 cm 60 cm
Profondeur tablette/coussinet pectoral : - à partir du pivot d'assise	- adulte moyen/grand - XT	0 à 27 cm 3 à 28 cm
Hauteur tablette standard : - à partir du pivot d'assise	adulte moyen/grand - XT	39 à 77 cm 37 à 80 cm
Largeur du support-genoux :	adulte moyen/grand/XT	23 cm
Embase cadre : - de roulette à roulette	adulte moyen/grand - XT	64 x 84 cm 69 x 95 cm
Poids de l'appareil de base :	adulte moyen - adulte grand - XT	46 kg 47 kg 51 kg
Couleur cadre :		Noir mat
Couleur garniture standard :		Noir
Dimensions tablette standard :		53 x 61 cm

NOUVEAUX CODES LPP

Code LPP : 6274230	Appareil modulaire de verticalisation	363,74 €
Code LPP : 6274247	Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal	35,06 €
Code LPP : 6274253	Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes	18,45 €

La verticalisation et ses bienfaits

La verticalisation assistée combat les effets secondaires d'une utilisation prolongée du fauteuil roulant.

Elle a un impact psychologique et donne de l'assurance.
Elle peut également contribuer à l'intégration de la personne à mobilité réduite.

Elle facilite la respiration et contribue à la réduction du risque d'infection pulmonaire.

Elle augmente l'endurance cardiovasculaire. Elle peut permettre de réduire les oedèmes au niveau des membres inférieurs.

Elle améliore le fonctionnement urinaire et permet ainsi de lutter contre le risque d'infection.

Elle régularise le fonctionnement de l'appareil digestif. Elle augmente l'activité gastro-intestinale et elle réduit le risque de constipation.

Elle est un moyen de lutter efficacement contre l'escarre grâce aux changements de position.

Elle augmente les amplitudes articulaires et aide à prévenir les rétractations au niveau des hanches, des genoux et des chevilles.

Elle permet une optimisation de la densité osseuse et donc de réduire le risque d'ostéoporose.

Elle active la circulation sanguine et réduit l'hypotension artérielle orthostatique quand elle est travaillée de manière régulière et prolongée.

Dans certains cas, elle peut contribuer à une réduction du tonus musculaire anormal et de la spasticité.



Configurations Evolv

PACK PRO

- Tablette suiveuse
- Dossier plat 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Châssis avant escamotable
- Levée électrique
- Supports genoux séparés STD
- Appui-tête
- Cale-tronc
- Assise rotative
- Cale-hanches

PACK BASIC


- Tablette suiveuse
- Dossier 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Levier de pompage hydraulique



Tablette suiveuse

PNG50130 - Petite [haut. assise-tablette 26,7 cm]
PNG50026 - Grande [haut. assise-tablette 34,3 cm]

Comprend un grand coussinet pectoral réglable et une tablette thérapeutique pour soutenir l'utilisateur pendant la transition de la position assise à la station debout. (plage de réglage entre le dossier et le coussinet pectoral : 15,2 à 35,6 cm)

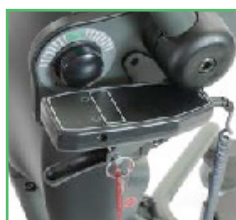

Levée électrique

PNG50010

Verticalisation assistée par un vérin électrique. Cette option comprend un vérin de type LINAK, une batterie rechargeable sur secteur, un chargeur et un système d'arrêt d'urgence.



Support-genoux séparés

PNG50425 - STD / PNG50426 - ROHO

Permettent d'accommoder facilement une contracture, un flexum ou une asymétrie du segment jambier. Partie rembourrée réglable en hauteur, profondeur et largeur. Escamotable pour les transferts.



Cale-hanches

PNG50161 Taille moyenne (la paire)

Plages de réglages:
 Evolv adulte moyen 23-38 cm / adulte grand 27-42 cm. Apporte un bon maintien du bassin et permet un bon alignement des membres inférieurs pendant le processus de verticalisation.

PNG50198 - Taille large (la paire)

Plages de réglages:
 Evolv adulte moyen 28-43 cm / adulte grand 32-47 cm



Sangles de maintien du pied

PNG30030 - La paire

Sangle avec attache velcro. Circonférence du pied de 10 à 17 cm



Cale-tronc

PNG50224 - 23 à 38 cm

PNG50176 - 30 à 46 cm

Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. Taille du coussinet : prof. 8 cm haut. 10 cm



Appui-tête

PNG50240 - 53 à 77 cm

PNG50037 - 61 à 85 cm

Réglable en hauteur et profondeur sur une plage de 10 cm, système articulé pour le plus grand confort de l'utilisateur.



Châssis avant escamotable

PNG50428

Chassis en H permettant un escamotage complet du support genoux afin de dégager l'accessibilité pour l'utilisateur et le thérapeute.



Dossier plat

PNG50066 - 48 cm



Assise rotative

PNG50324 - Adulte moyen

PNG50318 - Adulte grand, XT

Facilite les transferts perpendiculaires dans l'appareil. Ce dispositif rotatif se verrouille dans trois positions : dans l'axe et à 90° à gauche comme à droite.