



# L'embout Stella



## PRODUIT :

Embout stabilisateur universel pour cannes et béquilles

**Marque :** L'embout Stella      **Catégorie :** Dispositif d'aide à la mobilité

**Fonctionnalité :** L'embout Stella est bien plus qu'un accessoire : c'est une véritable innovation pour la sécurité et le confort de la marche. Il aide à prévenir les chutes, à améliorer la stabilité et à redonner confiance aux utilisateurs, tout en prolongeant la durée de vie de leur canne.

**Compatibilité :** cannes droites, béquilles, poignées en T (Maginot) et modèles standards.



## Descriptif :


Embout étoilé articulé pour cannes et béquilles de marche.

L'embout Stella est conçu pour offrir une sécurité maximale et un confort de marche incomparable à tous les utilisateurs de cannes, béquilles ou cannes anglaises.

Grâce à sa technologie brevetée à rotule interne et à sa large base à cinq pieds souples, il garantit une marche stable, fluide et amortie sur tous types de sols, même les plus glissants ou irréguliers.

Fabriqué avec des matériaux durables, il vous accompagnera plusieurs années sauf les 5 pieds, interchangeables après usure.

- **Pour qui ?** : Conçu pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les accidentés de la vie, nos aînés du grand âge, les personnes en parcours de rééducation ou réadaptation et les personnes utilisant des aides à la marche.
- **À quoi ça sert ?** : L'embout Stella aide à retrouver de la mobilité tout en répondant au besoin de sécurité et de confort en limitant significativement le risque de chutes, en amortissant les chocs ressentis par les membres supérieurs et en facilitant la récupération de la canne ou béquille par une pression lente et sans effort du pied.
- **Le + différenciant** : L'embout Stella est le seul embout pour cannes et béquilles à contenir un amortisseur et une rotule intégrée et il est entièrement fabriqué en France.

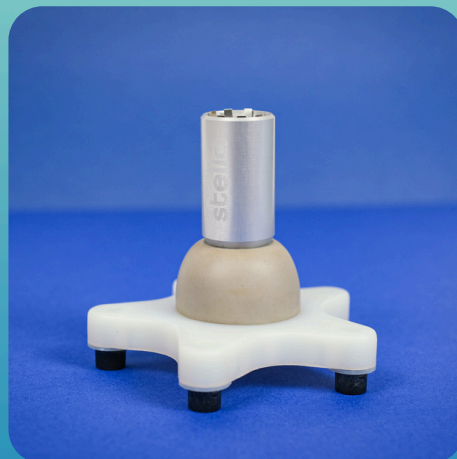

## Points forts :

- Adhérence au sol : il adhère sur tous les sols confondus (humides, glissants, sablonneux, etc.) qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
- Adaptation à l'inclinaison : il s'adapte automatiquement à l'inclinaison des bras afin de mieux suivre le mouvement et maintenir un contact prolongé avec le sol.
- Réduction des risques : il réduit le risque de glissement et de chutes.
- Stabilité lors des transferts : il assure une stabilité continue même lors des transferts de poids.
- Réduction des chocs : il amortit les chocs ressentis principalement dans les membres supérieurs.
- Produit durable : entièrement fabriqué en France, l'embout Stella est conçu pour durer des années, seuls les 5 pieds en élastomère sont à changer lors de leur usure presque totale.
- Tient debout toute seule : la canne équipée de l'embout Stella reste stable sur sol plat.
- Remise en position facile : une simple pression du pied permet de redresser la canne sans se pencher.
- Fixation solide et sécurisée – pratiquement inarrachable une fois installé.



# L'embout Stella



**pieds**  
élastomère & PA6

**étoile**  
polyamide PA6

**frette**  
inox 304

**amortisseur**  
caoutchouc 30/50 shore

**bague de rotule**  
polyamide PA6

**rotule**  
inox 304

**corps de rotule**  
aluminium anodisé

**platine crantée**  
inox ressort


**Technologie innovante brevetée :**  
**un grand pas pour la mobilité**

## Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 100 mm
- Diamètre inscrit : 118 mm
- Poids : environ 175 g
- Compatibilité : adaptable sur tous types de cannes et béquilles (bois et métal) de 16 à 20 mm de diamètre
- Matières composantes : inox 303, polyamide PA6, élastomère, aluminium anodisé, inox ressort & caoutchouc 30/50 shore
- Couleurs : corps gris, amortisseur beige, base étoilée blanche, 5 pieds en élastomère noirs
- Marquage CE

## Références internes :

- Embout unitaire complet : SKU 01  
Conditionnement : 1 pièce + 1 platine crantée montée d'origine de 18 à 20 mm + 1 platine crantée supplémentaire pour diamètre 16-18 + notice de montage
- Sachet de 10 pieds de remplacement : SKU 02  
Conditionnement : 1 sachet + 10 pieds en élastomère noir + notice de montage + outil d'aide au montage
- Platine crantée (18-20 mm) de rechange : SKU 03
- Platine crantée (16-18 mm) de rechange : SKU 04

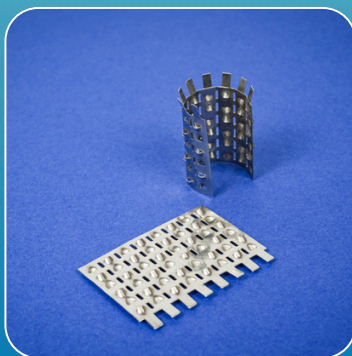

Platine crantée de rechange sur demande



Sachet de 10 pieds de remplacement avec notice

## Conditions d'utilisation :

L'inclinaison de la canne ou béquille ne doit pas dépasser les valeurs maximales suivantes par rapport à la verticale, sur un sol horizontal :

- Sur verglas, neige durcie .....5 à 10 °
- Sur marbre, carrelage, lino, revêtement plastique mouillés ou encaustiqués .....15 à 20 °
- Sur tous sols plans et secs .....30° maximum

Le dépassement de ces limites peut entraîner non seulement le dérapage incontrôlable sur sols dangereux mais aussi des dégâts irréparables sur la rotule interne.

Garantie de 2 ans dans le cadre du respect des conditions d'utilisation.

## Publics & professionnels ciblés :

- EHPAD & résidences autonomie
- Centres de rééducation & de réadaptation
- Ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc.
- Médecins généralistes, orthopédistes, orthopédistes-orthésistes et rhumatologues
- Pharmaciens
- Personnes à mobilité réduite (PMR)
- Personnes accidentées de la vie
- Personnes en rééducation post-opératoire ou post-traumatique
- Etc.

## SASU L'embout Stella

au capital social de 4000€

4J, chemin de Palente - 25000 BESANÇON

TVA FR 08989748843 - NAF 3250A

Siret : 989 748 843 00012 RCS Besançon

(+33) 07 59 64 19 42  
www.emboutstella.com  
contact@emboutstella.com

