
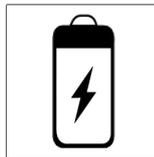


FAUTEUIL RELEVEUR ALTHEA'UP

disponible en 1 ou 2 moteurs

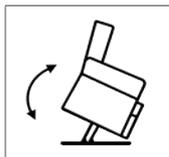

Le fauteuil ALTHEA 'UP est un fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions et qui facilite l'accès aux soins.

Sa fonction releveur est très appréciée par les personnes qui peinent à se relever, mais qui trouve également dans cette fonction, une aide véritable pour s'asseoir.

Ce fauteuil releveur électrique peut-être équipé d'accoudoirs relevables afin de faciliter les transferts (en option).

L'ALTHEA'UP à l'esthétique soignée est un produit Français exclusif sur le marché.

caractéristiques :

| | |
|---------------------------|---|
| hygiène | modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30° |
| modules de couettes | remplacement aisé en cas d'usure |
| composition de la couette | fibre creuse siliconée |
| positions | assise, TV, repos, releveur |
| sécurité | PVC non-feu M1 - tissus chinés non-feu EN 1021.1 & 1021.2 - velours non-feu EN 1021.1 |
| revêtements | velours, PVC, tissus chinés |
| largeurs d'assise | 53 cm |
| releveur 2 en 1 | 2 profondeurs au choix 45 ou 55 cm |
| options disponibles | poignées de préhension, support de téléphone, oreiller de confort, coussin lombaire, accoudoirs relevables, télécommande intégrée avec chargeur USB A et C, pochette latérale, kit batterie, pieds décoratifs, protection de tête, protection de fauteuil |
| poids maximum utilisateur | 160 kg |
| eco participation | 8,66€ (1 et 2 moteurs) |
| garanties | fauteuil : 2 ans / vérin et mécanique : 5 ans |
| franco à l'unité | oui |
| fabrication | France - région grand Est- Aube |



FAUTEUIL RELEVEUR ALTHEA'UP

dimensions en cm

| modèle ALTHEA'UP | largeur d'assise | profondeurs d'assise | largeur hors tout | hauteur assise | hauteur hors-tout | poids du fauteuil | poids maxi utilisateur |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 moteur | 53 cm | 45 ou 55 cm | 70 cm | 55 cm | 116 cm | 69 kg | 160 kg |
| 2 moteurs | 53 cm | 45 ou 55 cm | 70 cm | 55 cm | 116 cm | 71 kg | 160 kg |

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

utilisation de la télécommande

Fauteuil 1 moteur - télécommande 2 boutons



Bouton vert : Inclinaison du fauteuil vers l'arrière avec élévation du repose jambes
Bouton blanc : Retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose jambes puis passage en position releveur.

Fauteuil 2 moteurs - télécommande 4 boutons



Bouton vert : Inclinaison du dossier vers l'arrière.
Bouton blanc : Remontée du dossier en position droite.
Bouton bleu : Montée du repose jambes. Retour du fauteuil en position assise.
Bouton jaune : Abaissement du repose-jambes. Passage en position releveur du fauteuil.

Option télécommande intégrée avec chargeur USB A et C



Bouton avant : retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes, puis passage en position releveur.
Bouton arrière : inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose- jambes.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

LES COLORIS



VELOURS
SAPHIR



VELOURS
GALÈNE



PVC
BEIGE
AMANDE



TISSU
GRIS CHINÉ

velours déperlant non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2 🔥
 - saphir
 - galène

PVC non-feu M1
 - beige amande 🔥

tissus chinés non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2 🔥
 - gris chiné

LES OPTIONS



poignées de préhension



oreiller de confort



coussin lombaire



accoudoirs relevables



télécommande intégrée
 avec accès USB A et C



protection de fauteuil



pochette latérale



support téléphone



protection de tête



pieds décoratifs



kit batterie